

歯科医院用画像管理ソフトウェア

***Dental Photo Scape***  
**バージョンアップのお知らせ (2012. 03. 10 版)**  
**バージョン 1. 0. 6**

東九州ソフトウェア開発

改訂内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・ <b>口腔内写真 12 枚法への対応</b> 口腔内写真を 12 枚法で管理できるよう、口腔内写真の最大登録枚数が 9 枚から 12 枚へ拡張されました。</li> <li>・ <b>日付で比較レイアウトのドロップエリアの廃止</b> Dental Photo Scape では、登録済みの画像セットへの画像の追加は照会パネルで行います。ただし、『日付で比較』レイアウトでは画像を参照するのみで、画像を追加することはできません。にも関わらず日付で比較レイアウトにドロップエリアが表示されている問題を修正しました。</li></ul> <p>- 以上 -</p>
------	--

**連絡先**

ホームページ URL : <http://www.eksd.jp>  
電子メールアドレス : [support@eksd.jp](mailto:support@eksd.jp)


## 改訂内容

以下の変更点があります。

### 変更点 1 口腔内写真 12 枚法への対応

口腔内写真を 12 枚法で管理できるよう、口腔内写真の最大登録枚数が 9 枚から 12 枚へ拡張されました。


#### - 登録・照会パネル -

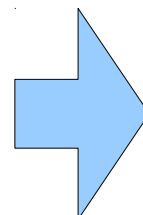

変更



登録・照会ともに 9 枚から 12 枚へ拡張されています。

 <b>重要</b>	<p>すでに登録済の画像は上図のように左側に寄った状態で表示されます。これは 9 枚から 12 枚への拡張に伴い右側の 3 枚分の領域が追加されたためです。</p>
--	--

(次ページへ続く)

(前ページからの続き)

- 設定画面 -

V-03 : 設定

■ 医院情報

名称・連絡先  
 医院名 九州まごころクリニック  
 住所1 大分市大痛1-2-3  
 住所2 大痛ビルディング 403  
 TEL No. 0975-11-1111  
 FAX No. 0975-22-2222

■ 口腔内写真撮影順序

5枚法  
 \* 右側側面 2 \* 上顎咬合面 1 \* 正面 3 \* 左側側面 4  
 \* 下顎咬合面 5


9枚法  
 \* 右側口蓋側面 1 \* 前歯部口蓋側面 2 \* 左側口蓋側面 3  
 \* 右側側面 4 \* 前歯部正面 5 \* 左側側面 6  
 \* 右側舌側面 7 \* 前歯部舌側面 8 \* 左側舌側面 9

12枚法  
 \* 右側口蓋側面 1 \* 前歯部口蓋側面 2 \* 左側口蓋側面 3 \* 上顎咬合面 4  
 \* 右側側面 5 \* 前歯部正面 6 \* 左側側面 7 \* 正面 8  
 \* 右側舌側面 9 \* 前歯部舌側面 10 \* 左側舌側面 11 \* 下顎咬合面 12

■ 各種支援

その他  
 外部プログラム 参照  
 自動10分割位置 1.0 19.0 10.0 49.0:20.0 39.0 1.0 49.0:40.0 59.0 1.0 49.0:60.0 79.0 1.0 49.0:80.0 99.0 10.0 49.0:1.0 19.0 51.0  
 自動14分割位置 1.0 14.0 10.0 49.0:15.0 29.0 10.0 49.0:30.0 42.3 1.0 49.0:43.3 55.6 1.0 49.0:56.6 69.0 1.0 49.0:70.0 84.0 10.0  
 印刷タイトル

保存 取消

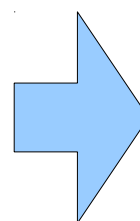

変更

V-03 : 設定

■ 医院情報

名称・連絡先  
 医院名 九州まごころクリニック  
 住所1 大分市大痛1-2-3  
 住所2 大痛ビルディング 403  
 TEL No. 0975-11-1111  
 FAX No. 0975-22-2222

■ 口腔内写真撮影順序

5枚法  
 \* 右側側面 2 \* 上顎咬合面 1 \* 正面 3 \* 左側側面 4  
 \* 下顎咬合面 5

9枚法  
 \* 右側口蓋側面 1 \* 前歯部口蓋側面 2 \* 左側口蓋側面 3  
 \* 右側側面 4 \* 前歯部正面 5 \* 左側側面 6  
 \* 右側舌側面 7 \* 前歯部舌側面 8 \* 左側舌側面 9

■ 各種支援

その他  
 外部プログラム 参照  
 自動10分割位置 1.0 19.0 10.0 49.0:20.0 39.0 1.0 49.0:40.0 59.0 1.0 49.0:60.0 79.0 1.0 49.0:80.0 99.0 10.0 49.0:1.0 19.0 51.0  
 自動14分割位置 1.0 14.0 10.0 49.0:15.0 29.0 10.0 49.0:30.0 42.3 1.0 49.0:43.3 55.6 1.0 49.0:56.6 69.0 1.0 49.0:70.0 84.0 10.0  
 印刷タイトル

保存 取消

また、設定画面についても12枚法の撮影順序を登録するための項目が新設されています。



**重要**

12枚法の撮影順序は1、2、3、4、5、...〈省略〉...11、12という初期値が設定されます。12枚法で管理される場合は設定画面にてこれらの項目を適切に設定してください。


(次ページへ続く)

(前ページからの続き)

- 印刷 -

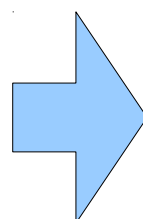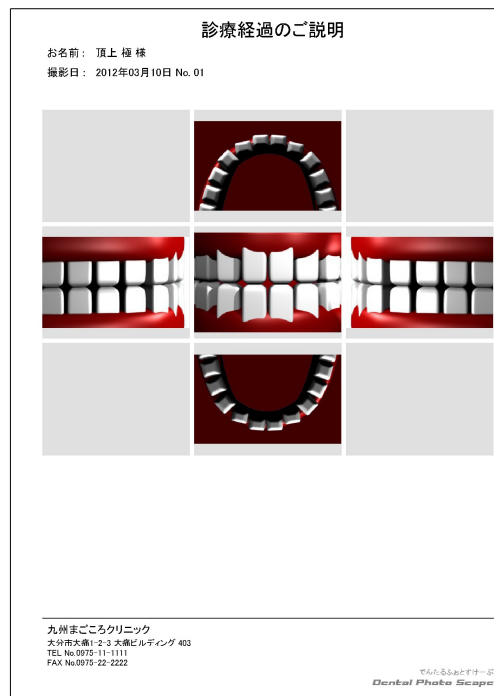

変更

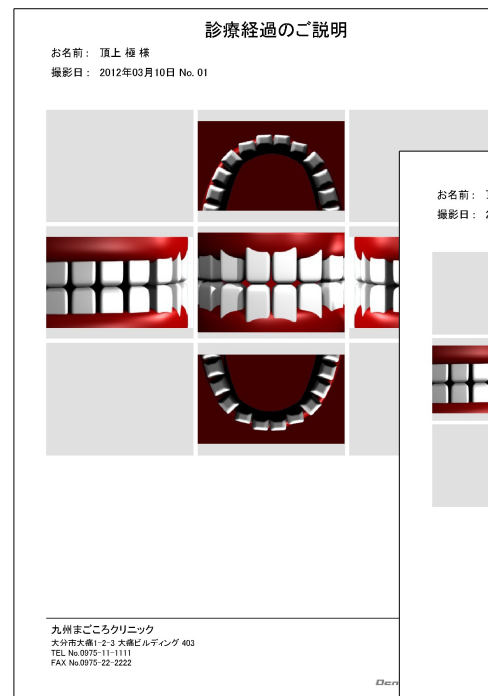


印刷物は5枚法および9枚法で登録されている画像(右の列の3枚が未使用)については今までどおりの9枚レイアウトで、右の列の3枚が使用されている画像については12枚レイアウトで印刷されます。

## 変更点 2 日付で比較レイアウトのドロップエリアの廃止

Dental Photo Scape では、登録済みの画像セットへの画像の追加は照会パネルで行います。ただし、『日付で比較』レイアウトでは画像を参照するのみで、画像を追加することはできません。にも関わらず日付で比較レイアウトにドロップエリアが表示されている問題を修正しました。

- 日付で比較レイアウトの画像表示エリア -

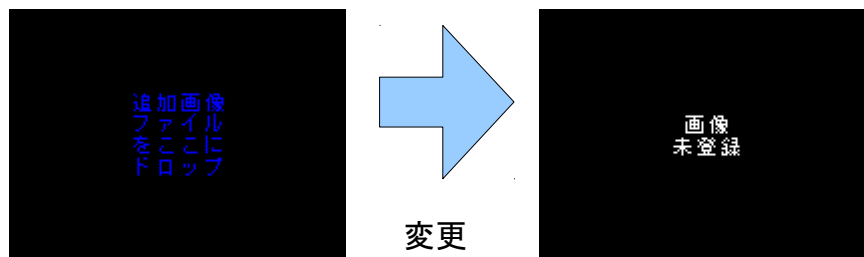

『追加画像ファイルをここにドロップ』の表示を『画像未登録』に変更しました。また、ファイルのドロップを受け付けないように修正を行いました。