

歯科医院用画像管理ソフトウェア

***Dental Photo Scape***  
**インストールガイド**

東九州ソフトウェア開発

**連絡先**

ホームページ URL : <http://www.eksd.jp>  
電子メールアドレス : [support@mail.eksd.jp](mailto:support@mail.eksd.jp)


# 目次

はじめに .....	3
本書について .....	3
動作に必要なパーソナルコンピュータの要件 .....	4
情報の保存場所について .....	5
情報の保存場所を事前に決めておく .....	6
インストールの流れについて .....	7
本ソフトウェア製品で使用されているソフトウェアのライセンス情報 .....	8
インストール手順(PC内保存) .....	9
インストーラの実行 .....	10
インストール .....	12
インストールの完了 .....	17
Dental Photo Scape の起動 .....	18
保存場所の選択 .....	19
データベースのセットアップ .....	20
試用確認 .....	22
メイン画面 .....	23
Dental Photo Scape の終了 .....	24
インストール手順(NAS上保存1台目のPC) .....	25
ネットワーク接続ハードディスクの準備 .....	26
インストーラの実行 .....	27
インストール .....	29
インストールの完了 .....	34
Dental Photo Scape の起動 .....	35
保存場所の選択 .....	36
保存場所の決定 .....	37
データベースのセットアップ .....	38
試用確認 .....	40
メイン画面 .....	41
Dental Photo Scape の終了 .....	42
インストール手順(NAS上保存2台目以降のPC) .....	43
ネットワーク接続ハードディスクの準備 .....	44
インストーラの実行 .....	45
インストール .....	47
インストールの完了 .....	52
Dental Photo Scape の起動 .....	53
保存場所の選択 .....	54
保存場所の決定 .....	55
試用確認 .....	56
メイン画面 .....	57
Dental Photo Scape の終了 .....	58
次に行うべき作業 .....	59

## はじめに

### 本書について

本書は、Dental Photo Scape のパーソナルコンピュータへのインストールについて説明しています。

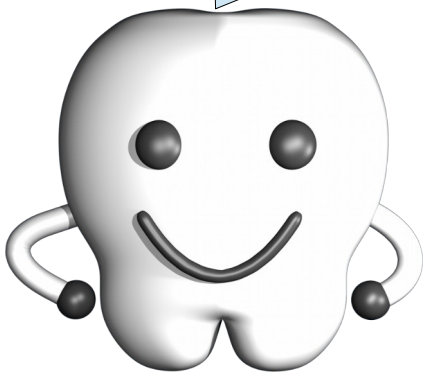

インストールとデータベースのセットアップ


本書

機能設定・日々の業務（画像の登録・照会）

不定期の作業

## 動作に必要なパーソナルコンピュータの要件


Dental Photo Scape のインストールおよび、その後の利用にあたっては、以下の要件を満たしているパーソナルコンピュータおよび関連機器が必要になります。

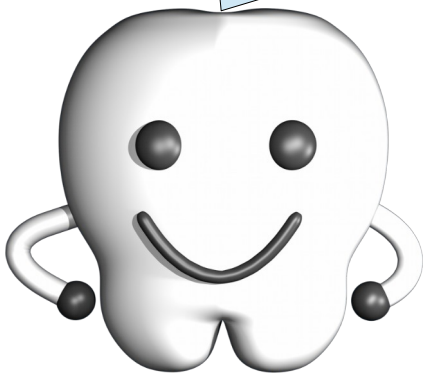

Windows のバージョン	Windows XP または Windows Vista または Windows 7 または Windows 8 / 8.1 または Windows 10
画面	1024 x 768 以上の解像度
メモリ	512MByte 以上のメモリを搭載していること かつ 上記の Windows のバージョンのシステム要件を満たしていること
ハードディスク	導入時：約 40MByte の容量を使用 運用時：本ソフトウェアに登録したデジタル画像の容量の 2 倍を消費

## 情報の保存場所について

Dental Photo Scapeは、パーソナルコンピュータ内に情報を保存することも、ネットワーク接続ハードディスク上に情報を保存することもできます。それぞれ、以下のような特徴があります。

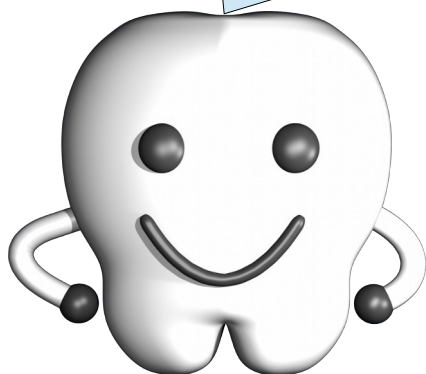

ネットワーク接続ハードディスクは、製品によって『LAN接続ハードディスク』、『LAN対応ハードディスク』、『ネットワーク接続ストレージ』、『NAS(Network Attached Storage)』など名称は異なります。

### - (A) パーソナルコンピュータ内に保存 -

情報はDental Photo Scapeを実行しているパーソナルコンピュータ内に保存されます。



この方式では、他のパーソナルコンピュータから画像の登録や照会を行うことはできません。複数台のパーソナルコンピュータで情報を共有することはできません。

### - (B) ネットワーク接続ハードディスク上に保存 -


ネットワーク接続ハードディスク上に情報を保存し、パーソナルコンピュータから画像の登録や照会を行います。



この方式では、複数台のパーソナルコンピュータから登録・参照を行うことができます。また、この方式ではネットワーク接続ハードディスクが1台必要になります。

## 情報の保存場所を事前に決めておく

パーソナルコンピュータ内に情報を保存するか、ネットワーク接続ハードディスク上に情報を保存するかは、インストールを行う前に決めておく必要があります。以下を参考に情報の保存場所を決めてください。

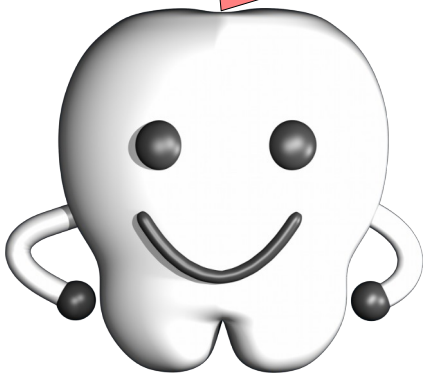

1台のパーソナルコンピュータでしか利用しない  
(将来的にも)

(A)  
パーソナルコンピュータ内  
に保存


複数台のパーソナルコンピュータで情報を共有する

(B)  
ネットワーク接続ハードディスク上  
に保存

まずは1台のパーソナルコンピュータで利用するが  
将来的には複数台で運用する

## インストールの流れについて

あらかじめ決定しておいた情報の保存場所によってインストールの流れが異なります。以下を参照して必要な作業を実施してください。

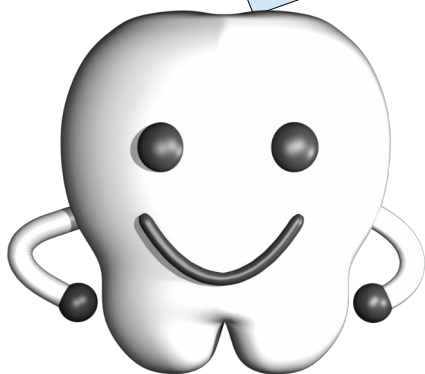

(A) パーソナルコンピュータ内に保存する  
9 ページ 『インストール手順 (PC 内保存)』へ

(B) ネットワーク接続ハードディスク上に保存する

- 1 台目の PC の場合 -  
25 ページ 『インストール手順 (NAS 上保存 1 台目の PC)』へ

- 2 台目以降の PC の場合 -  
43 ページ 『インストール手順 (NAS 上保存 2 台目以降の PC)』へ

## 本ソフトウェア製品で使用されているソフトウェアのライセンス情報

本ソフトウェア製品は、複数のソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東九州ソフトウェア開発または第三者の著作権が存在します。

**- libjpeg -**

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

**- OpenSSL -**

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


This product includes cryptographic software written by Eric Young. (eay@cryptsoft.com)



## インストール手順(PC内保存)

情報をパーソナルコンピュータ内に保存する場合のインストールの手順を説明します。

Dental Photo Scape のインストールと保存場所の選択を行います。

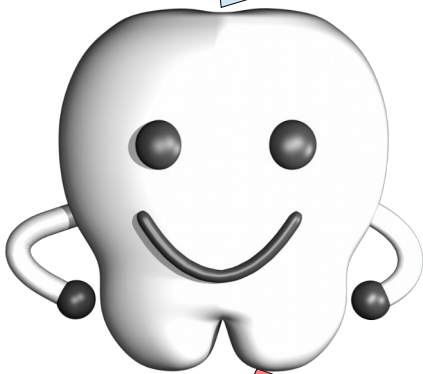

なお、Dental Photo Scape をバージョンアップする場合など、すでにDental Photo Scape がインストールされている場合は、最初にインストール済みのDental Photo Scape のアンインストールを実施してください。

アンインストールしてもデータは消去されずに新バージョンに引き継がれます。

アンインストールの手順については、別冊の、

- ・ 『Dental Photo Scape 操作マニュアル - 応用編 -』



を参照ください。

## インストーラの実行

ダウンロードした、

SetupDentalPhotoScape-X.X.X.exe (下図参照)  
(X.X.Xの部分はバージョン番号に読み替えてください)



をダブルクリックし、インストーラを起動します。

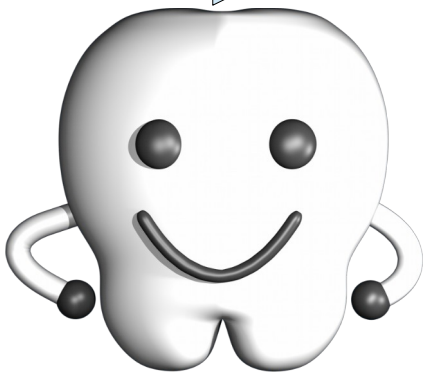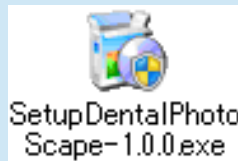

Windows XPの場合は、管理者権限が割り当てられたユーザでログインしてインストーラ (SetupDentalPhotoScape-X.X.X.exe) を起動してください。

よくわからなければ、初回起動時に作成したユーザでDental Photo Scapeのインストーラを実施してください。


インストール時に『ユーザー アカウント制御』という画面（下図参照）が表示されることがあります。

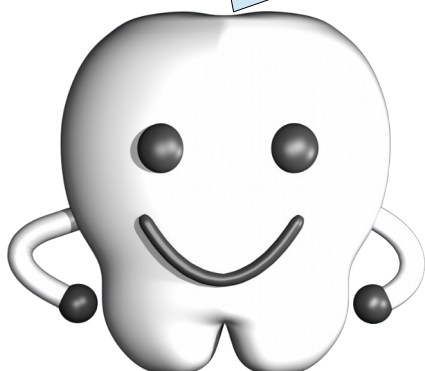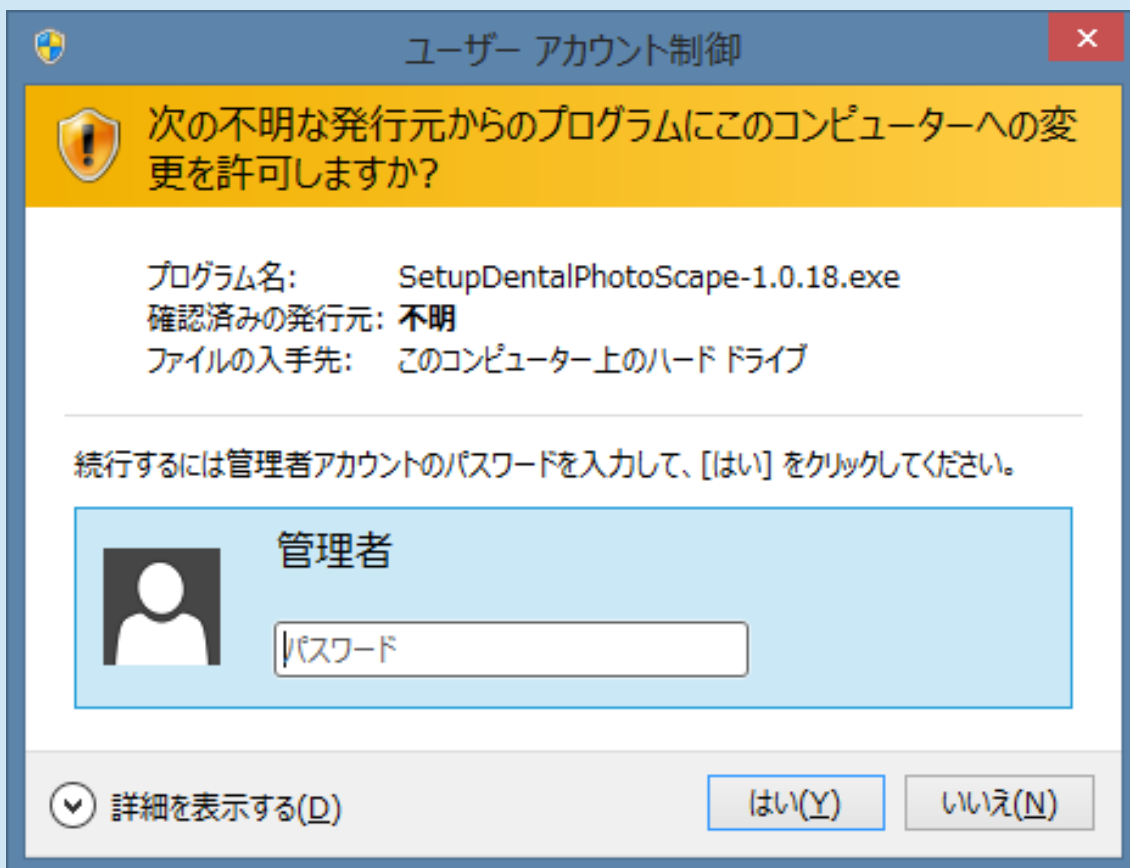

その場合には、**管理者のパスワードを入力してインストールを継続してください。**

## インストール

インストーラが起動しますので、下記の要領にて画面の操作を行って、インストールを行ってください。

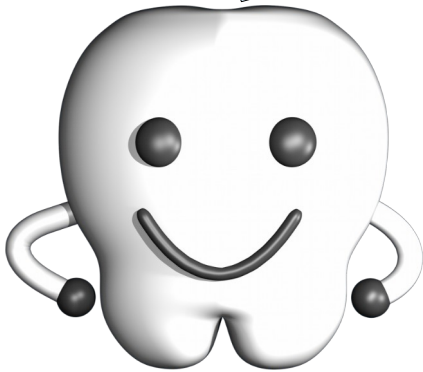


## 1. ようこそ画面




ようこそ画面です。インストールを中断する場合は[キャンセル]ボタンを、続行する場合は、[次へ >]ボタンを押して次へ進みます。

## 2. 使用許諾条件への同意

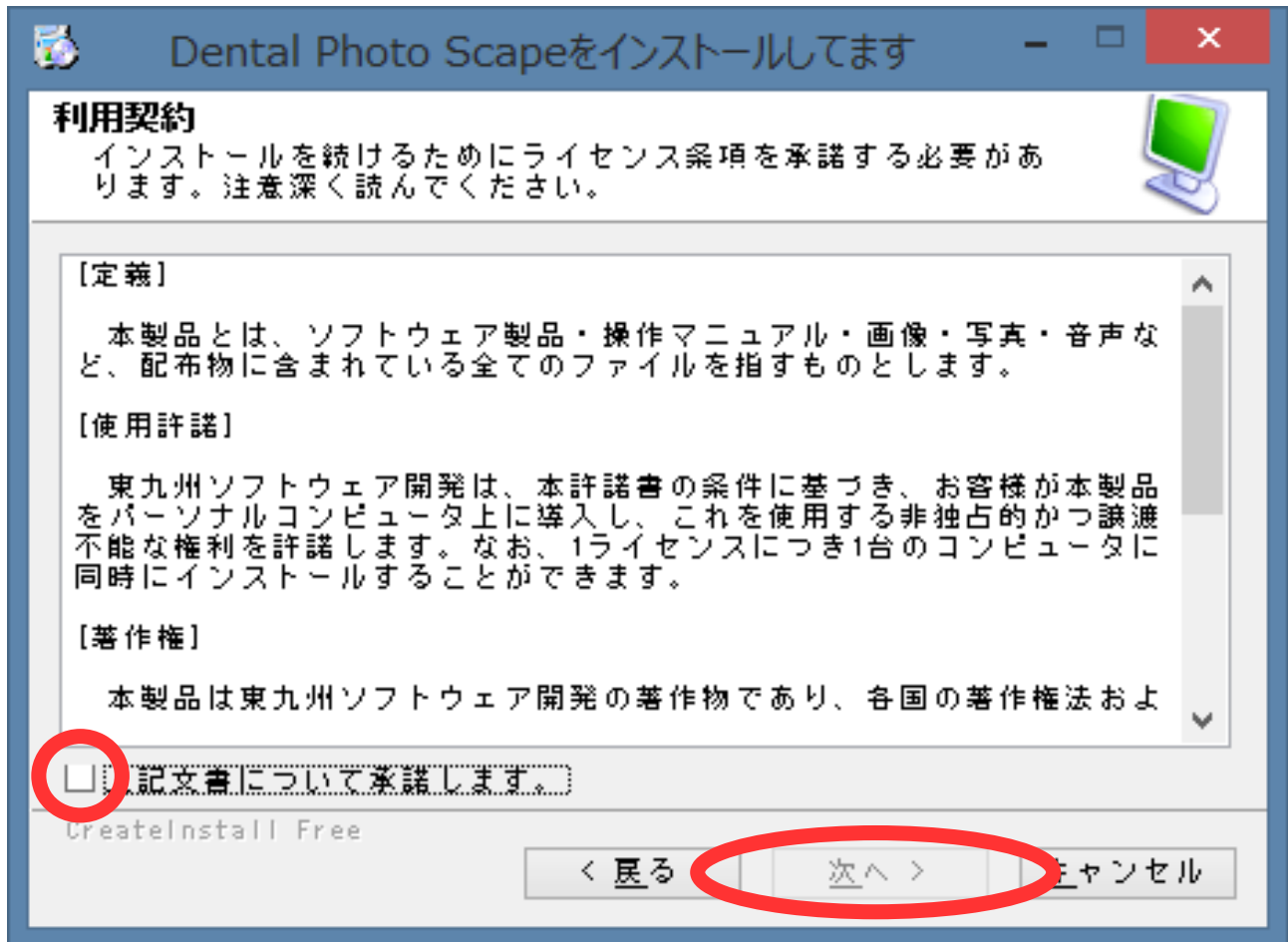


ライセンス条項(製品の使用許諾条件)が表示されます。内容を確認し、同意する場合は、[上記文書について承諾します。]チェックボックスをチェックし、[次へ >]ボタンを押して次へ進みます。承諾できない場合は、[キャンセル]ボタンを押してインストールを中断してください。

## 3. 製品の配置場所の設定

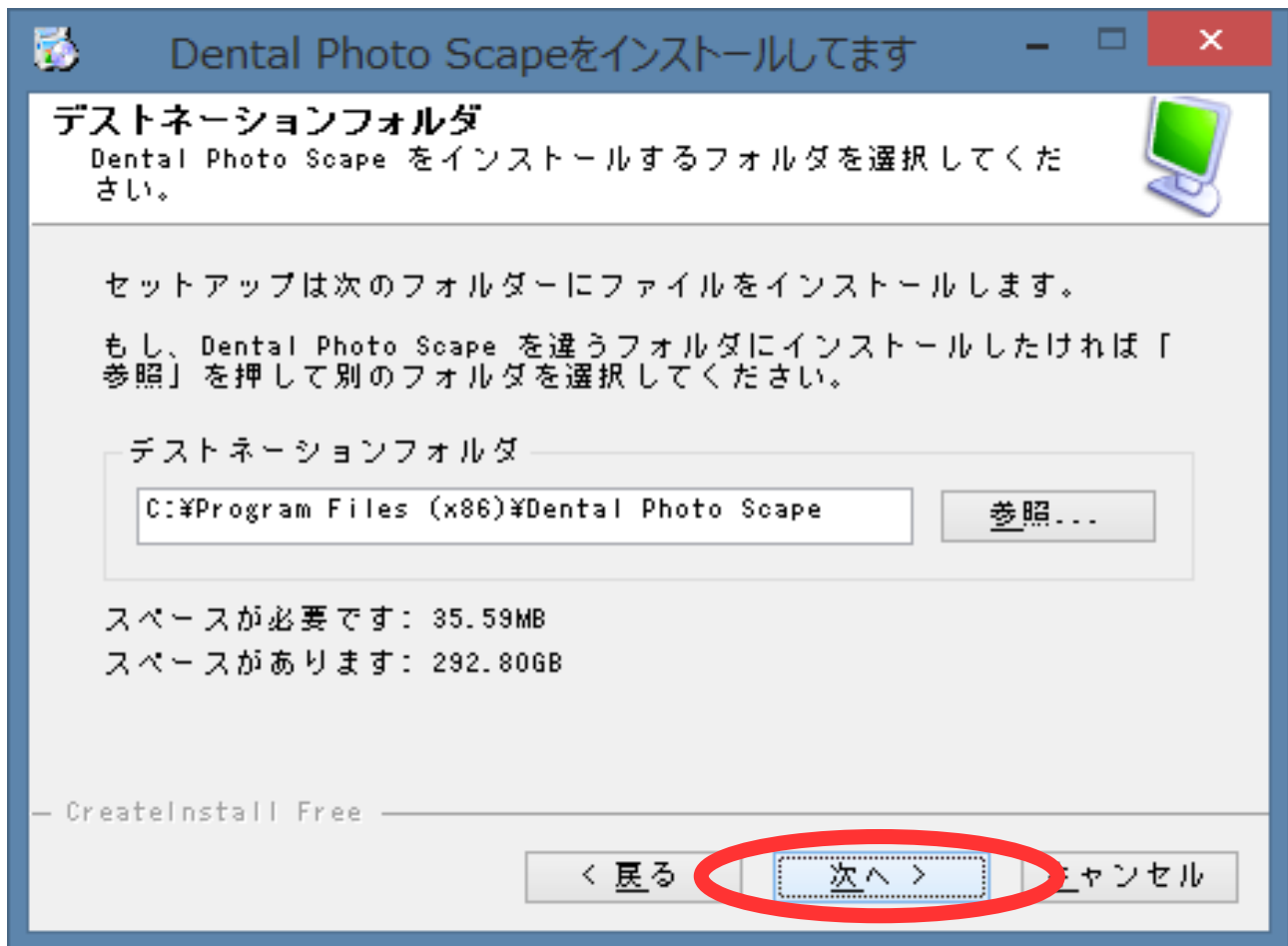


製品の配置場所を指定します。**初期値のままです問題ありません。**初期値のままインストールを行う場合は、[次へ >]ボタンを押して次へ進みます。別の場所にインストールを行う場合には、[参照]ボタンを押して場所を変更し、[次へ >]ボタンを押して次へ進みます。

## 4. 進行中画面

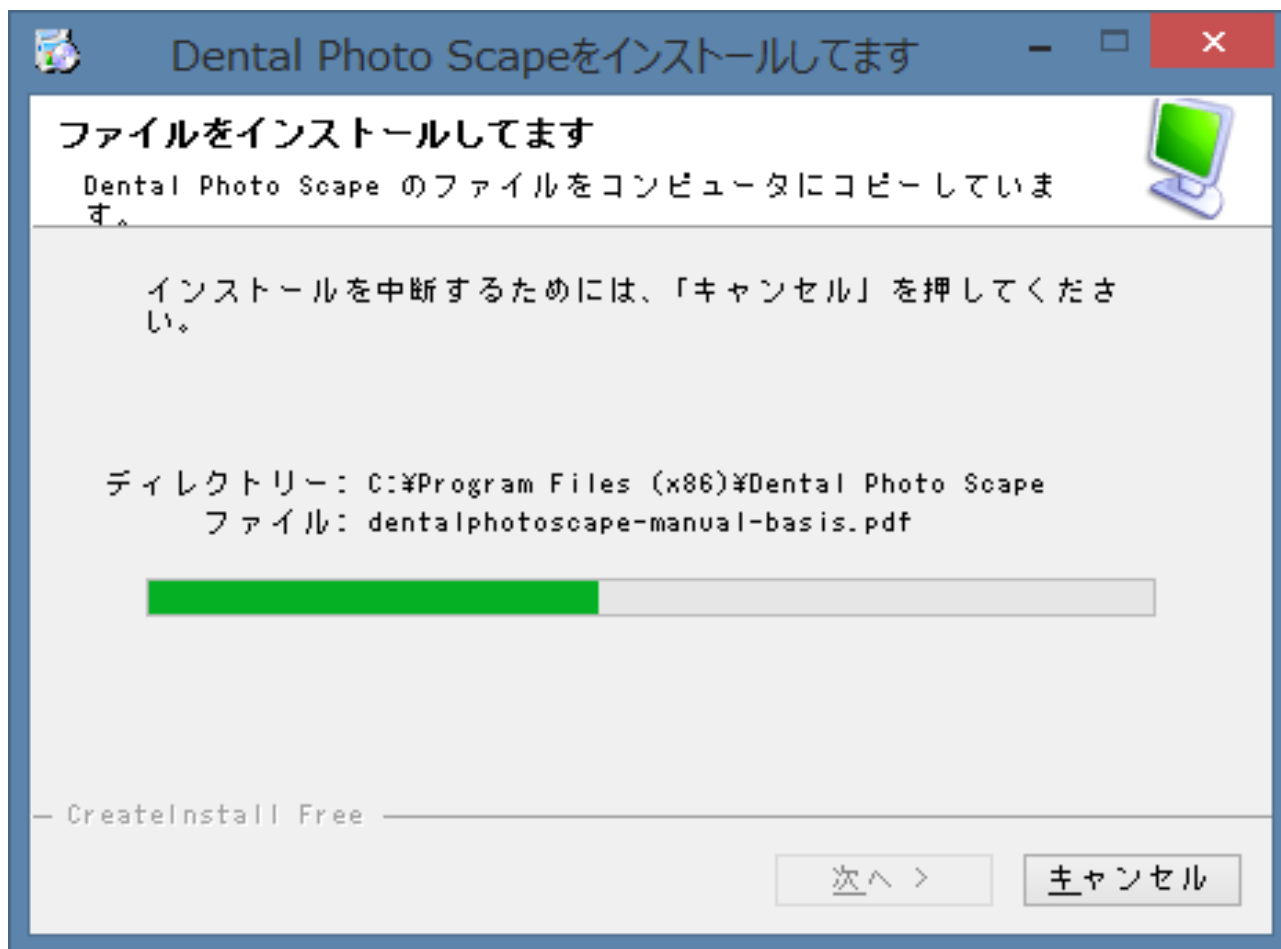

インストールの進行具合が表示されます。自動的に次へ進みますのでそのままお待ちください。

## 5. 完了画面

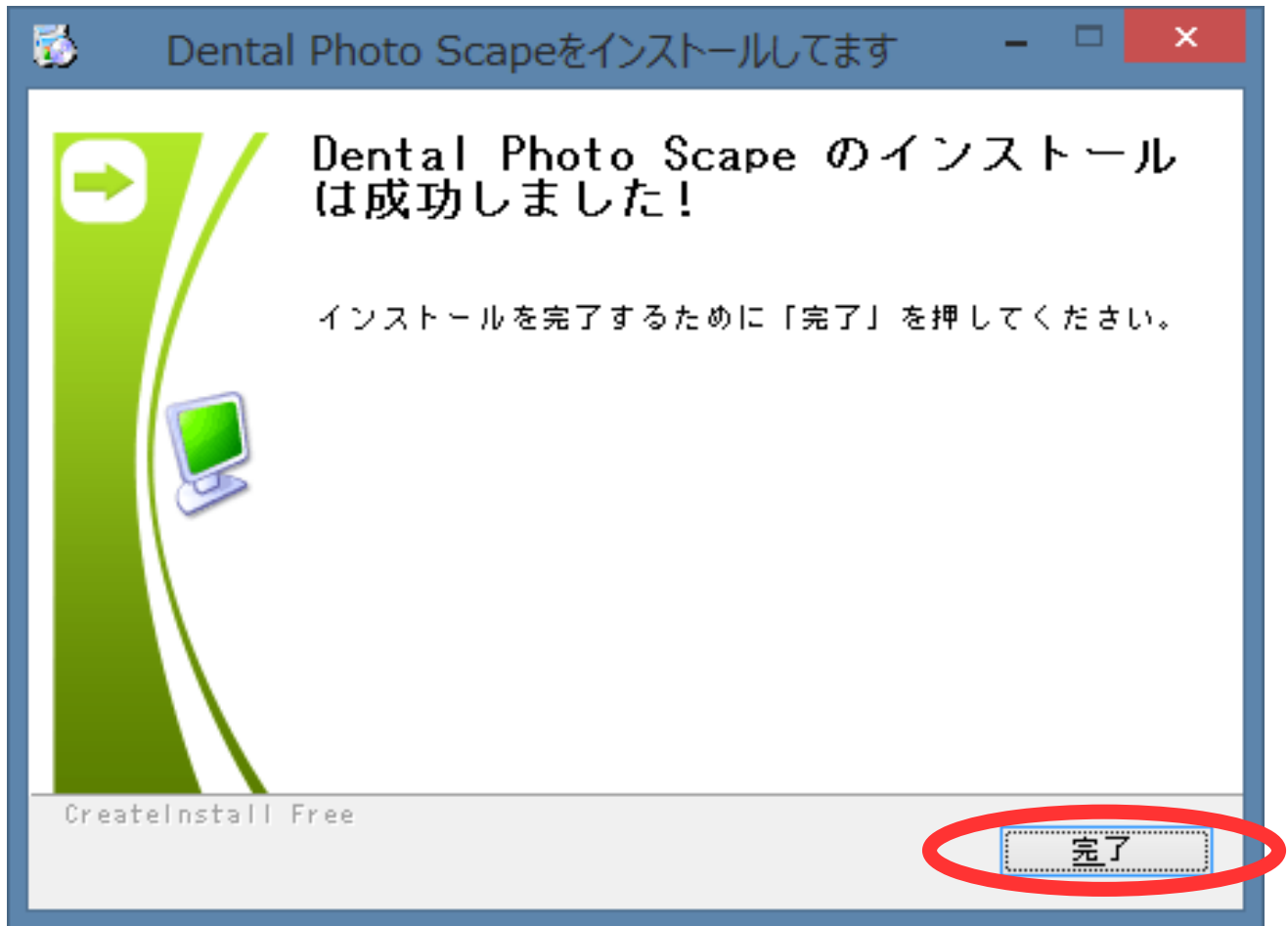


インストールが正常に終了したことを表しています。[完了]ボタンを押してインストーラを終了してください。インストールが正常に終了すると、デスクトップにDental Photo Scapeを起動するためのアイコンやマニュアルを参照するためのアイコンが作成されます。



## インストールの完了

インストールが完了しました。続いて、Dental Photo Scape の起動を行いましょ。

初めての起動では、情報の保存場所を選択することができます。ここでは、パーソナルコンピュータ内に保存するよう設定を行います。

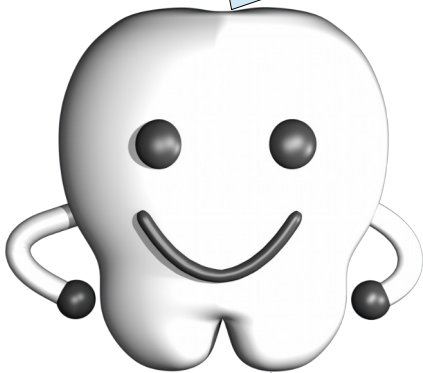


また、自動的にデータベースのセットアップ機能も動作します。データベースのセットアップにより、患者様情報のサンプルが作成されます。

自動的なデータベースのセットアップは、新規インストールの場合のみ実施されます。

バージョンアップ後の起動時には実施されませんので、旧バージョンのデータを引き継いで利用することができます。


## Dental Photo Scape の起動

デスクトップに作成されたDental Photo Scapeアイコン（下図参照）をダブルクリックするか、スタートメニューからDental Photo Scapeを起動します。

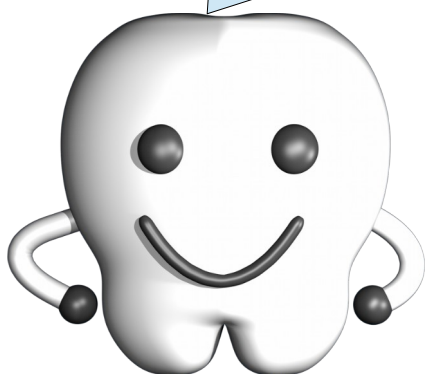


## 保存場所の選択

Dental Photo Scape の初めての起動では、下図のメッセージ (Dental Photo Scape は1台のパーソナルコンピュータのみで...<省略>... 複数台のパーソナルコンピュータで利用しますか?) が表示されます。

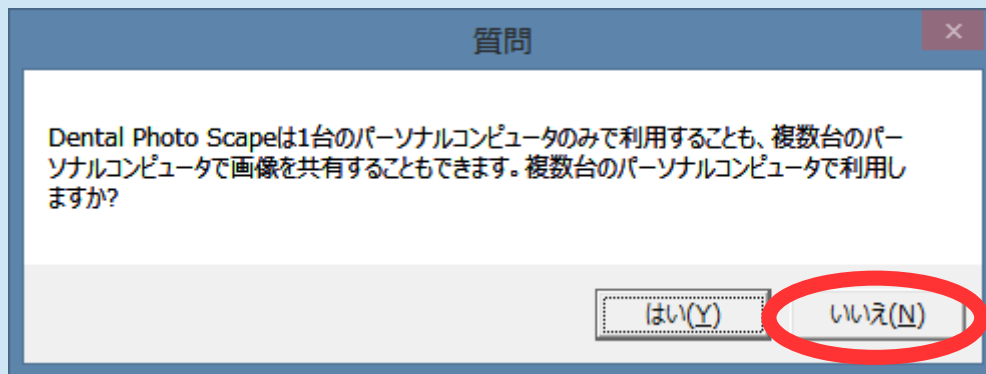

今回は [ いいえ (N) ] ボタンを押します。

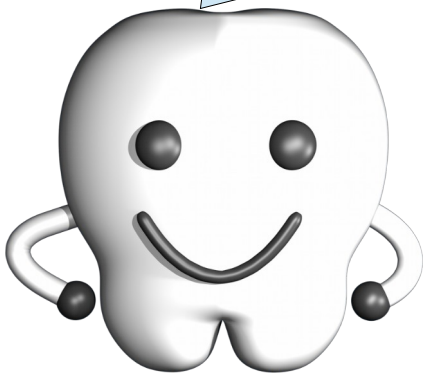

間違えて [ はい (Y) ] ボタンを押した場合は、次に表示される、

『フォルダーの参照』画面


で、[ キャンセル ] ボタンを押し、さらに表示される、

『フォルダが選択されませんでした。...<省略>...1台のパーソナルコンピュータのみで利用しますか?』

の質問に [ はい (Y) ] ボタンを押してください。


## データベースのセットアップ

Dental Photo Scape の初めての起動では、さらに、下図のメッセージ（データベースのセットアップを行います。...〈省略〉... 次回からは実施されません。）が表示されます。

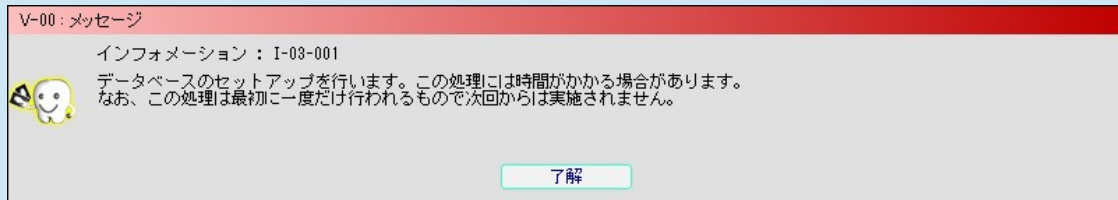

『データベースのセットアップ』により患者様情報のサンプルが作成されます。

[了解] ボタンを押し、データベースのセットアップを続行します。

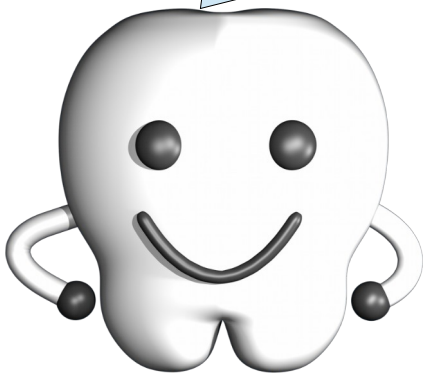


データベースのセットアップの進行具合が表示されます。

#### V-01: セットアップ

データベースのセットアップ中です。この処理には時間がかかる場合があります。処理が完了するまでこのままお待ちください。



自動的に次へ進みますのでそのままお待ちください。数十秒から数分の時間がかかります。

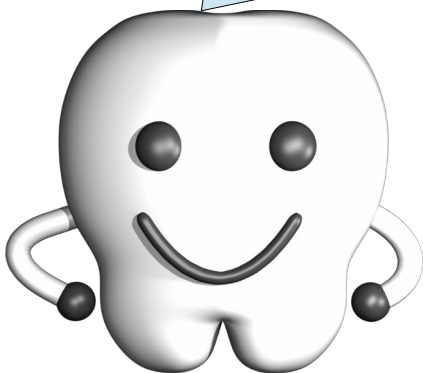

データベースのセットアップが完了すると、下図のメッセージ（データベースのセットアップが完了しました。）が表示されますので、[了解]ボタンを押してください。

#### V-00: メッセージ

インフォメーション: I-03-002

データベースのセットアップが完了しました。



了解

## 試用確認

続けて、以下の画面が表示されます。この画面は、ライセンスを購入していない場合にのみ表示されるもので、ライセンスを購入し、正式版となった後は表示されません。

V-02: ライセンス認証


この製品はライセンス認証が行われていないため正式版とはなっておりません。試用する場合は[試用] ボタンを押してください。

ライセンスを購入済みである場合は[認証]を、ライセンスを購入する場合は[購入] ボタンを押してください。

なお、試用期間は導入から60日間となっております。

プロダクトキー | 9276-8351-0102

購入  
認証  
試用

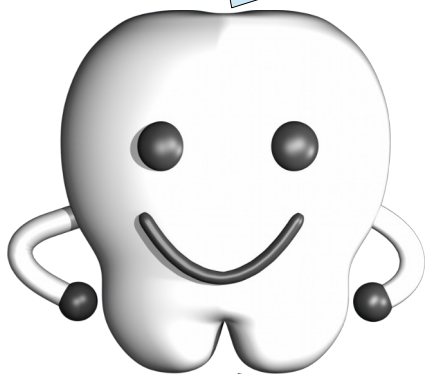


ここでは [試用] ボタンを押して下さい。

試用期間が満了するまでの残日数が表示されますので、[了解] ボタンを押してください。

V-00: メッセージ


インフォメーション: I-03-005

 この製品の試用期間は、残り 59 日です。

了解


## メイン画面

続いて、以下のようにメイン画面が表示されます。

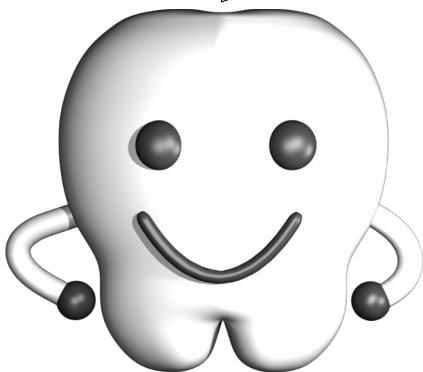

## Dental Photo Scape の終了

では、Dental Photo Scape を終了します。画面の右上にある [ 終了 ] ボタン（下図参照）を押してください。

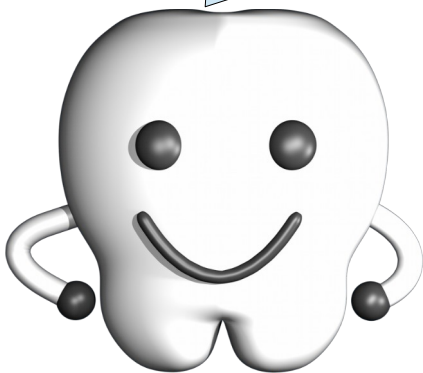


59 ページ 『次に行うべき作業』 へ



## インストール手順 (NAS 上保存 1 台目の PC)

情報をネットワーク接続ハードディスク上に保存する場合の1台目のパーソナルコンピュータでのインストールの手順を説明します。

ネットワーク接続ハードディスクの準備を行い、続いて、Dental Photo Scape のインストールと保存場所の選択を行います。

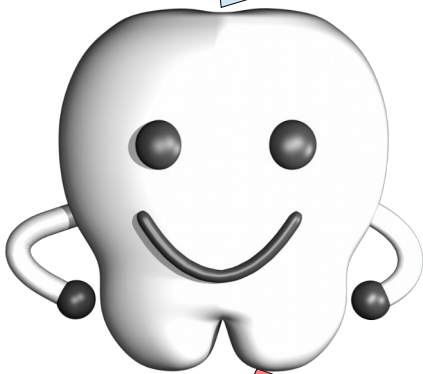

なお、Dental Photo Scape をバージョンアップする場合など、すでに Dental Photo Scape がインストールされている場合は、最初にインストール済みの Dental Photo Scape のアンインストールを実施してください。

アンインストールしてもデータは消去されずに新バージョンに引き継がれます。

アンインストールの手順については、別冊の、


- ・ 『Dental Photo Scape 操作マニュアル - 応用編 -』

を参照ください。

## ネットワーク接続ハードディスクの準備

ネットワーク接続ハードディスクを設置し、Dental Photo Scape の情報（患者様情報や画像）の保存場所となる共有フォルダを作成し、共有設定を行います。

手順は、ネットワーク接続ハードディスクの製品ごとに異なりますので、ここでは説明できません。製品に付属のマニュアルを参考にフォルダの作成および共有設定を行ってください。

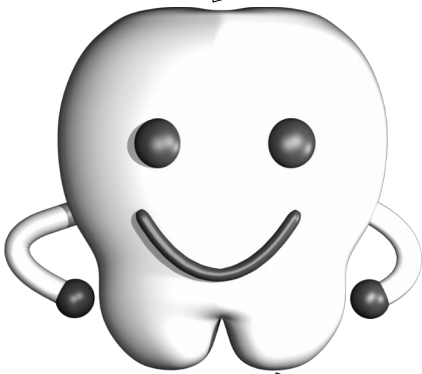

ネットワーク接続ハードディスク側で作成した共有フォルダを、パーソナルコンピュータ側からネットワークドライブを割り当てて共有します。これにより、共有することはもちろん、内蔵のハードディスクやCD/DVDドライブと同様に『ドライブ』として扱う事もできるようになります。

Windowsでは、ドライブはC:のように英字のドライブ文字 + :(コロン)で表され、ドライブ文字にはAからZまでを割り当てることができます。既存のドライブ文字と重複しないZ:などを割り当ててください。



ネットワークドライブの割り当て方法は、ネットワーク接続ハードディスクに付属のマニュアルを参考に作業を行ってください。

## インストーラの実行

ダウンロードした、

SetupDentalPhotoScape-X.X.X.exe (下図参照)  
(X.X.Xの部分はバージョン番号に読み替えてください)



をダブルクリックし、インストーラを起動します。

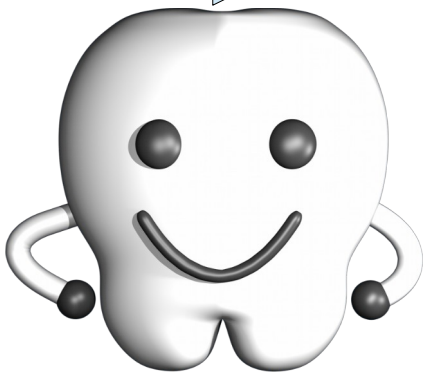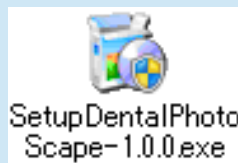

Windows XPの場合は、管理者権限が割り当てられたユーザでログインしてインストーラ (SetupDentalPhotoScape-X.X.X.exe) を起動してください。

よくわからなければ、初回起動時に作成したユーザでDental Photo Scapeのインストーラを実施してください。


インストール時に『ユーザー アカウント制御』という画面（下図参照）が表示されることがあります。

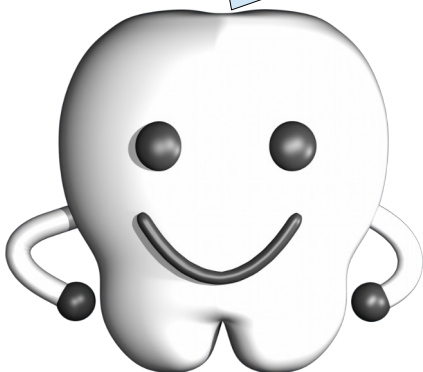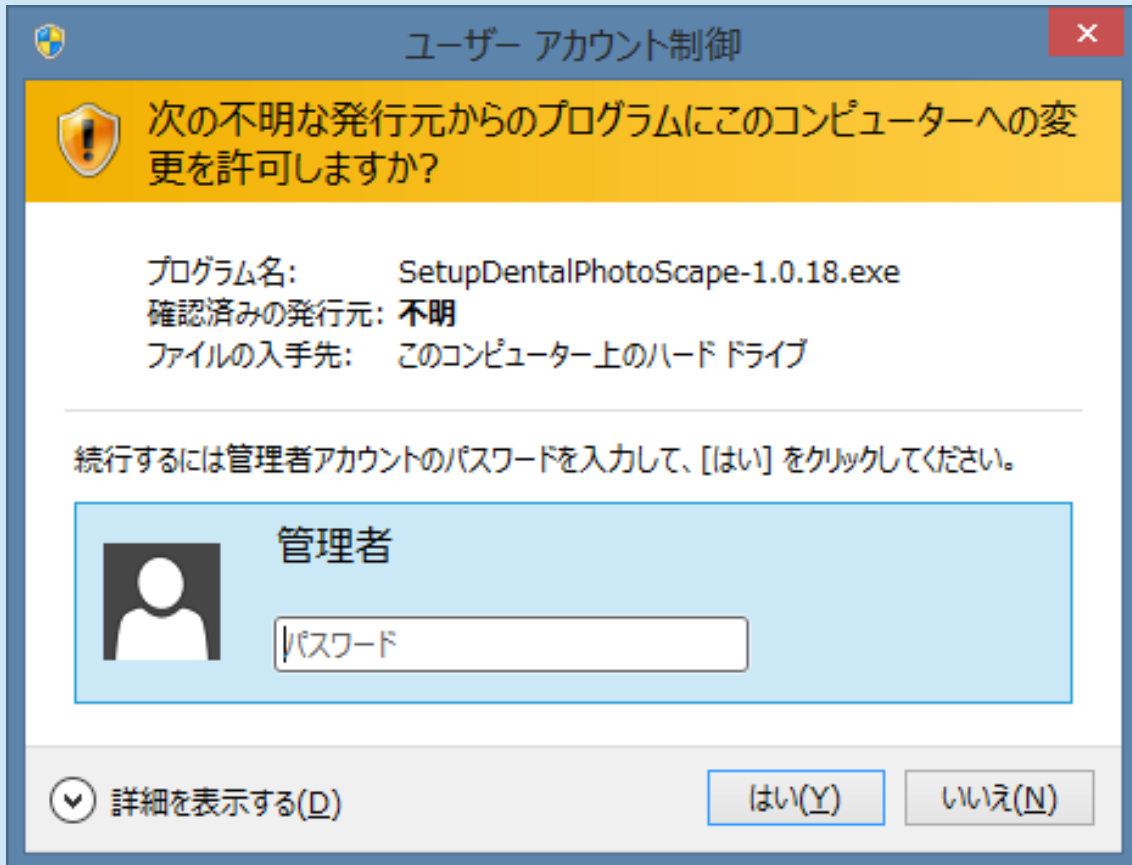

その場合には、**管理者のパスワードを入力してインストールを継続してください。**

## インストール

インストーラが起動しますので、下記の要領にて画面の操作を行って、インストールを行ってください。

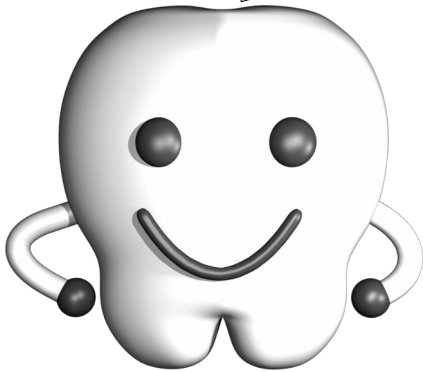


## 1. ようこそ画面



ようこそ画面です。インストールを中断する場合は[キャンセル]ボタンを、続行する場合は、[次へ >]ボタンを押して次へ進みます。

## 2. 使用許諾条件への同意

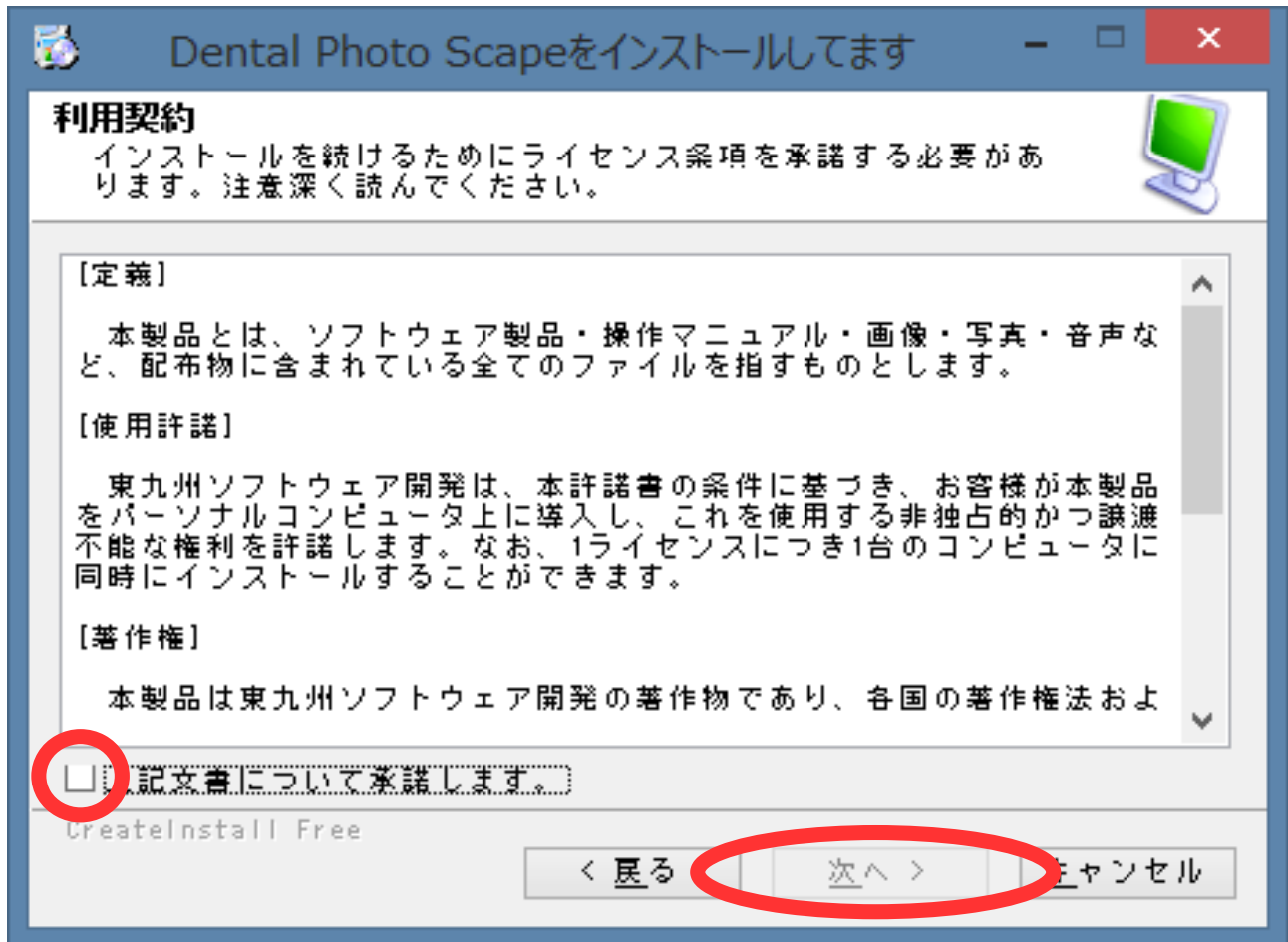


ライセンス条項(製品の使用許諾条件)が表示されます。内容を確認し、同意する場合は、[上記文書について承諾します。]チェックボックスをチェックし、[次へ >]ボタンを押して次へ進みます。承諾できない場合は、[キャンセル]ボタンを押してインストールを中断してください。

## 3. 製品の配置場所の設定



製品の配置場所を指定します。**初期値のままです問題ありません。**初期値のままインストールを行う場合は、[次へ >] ボタンを押して次へ進みます。別の場所にインストールを行う場合には、[参照] ボタンを押して場所を変更し、[次へ >] ボタンを押して次へ進みます。


## 4. 進行中画面

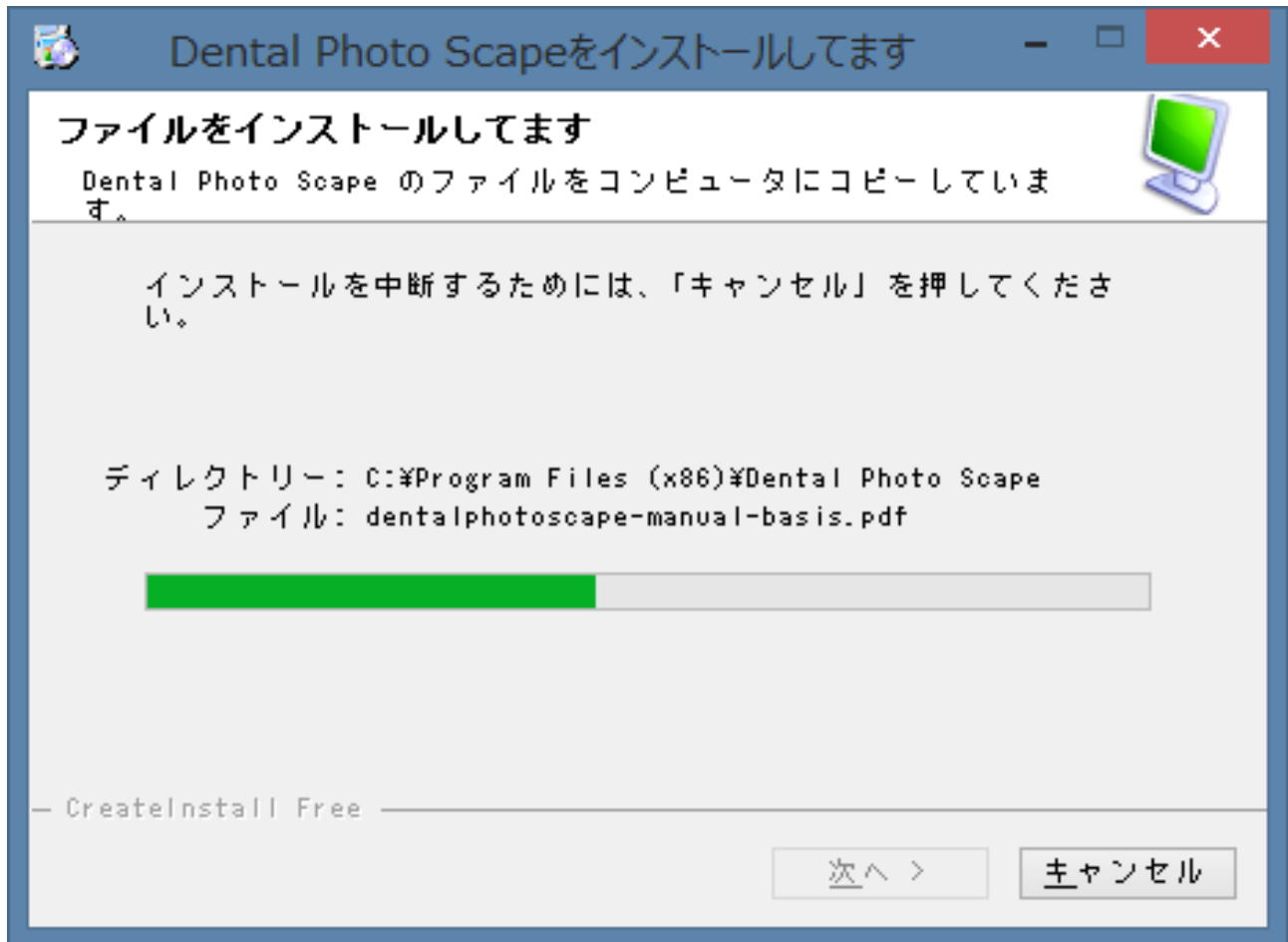

インストールの進行具合が表示されます。自動的に次へ進みますのでそのままお待ちください。



## 5. 完了画面

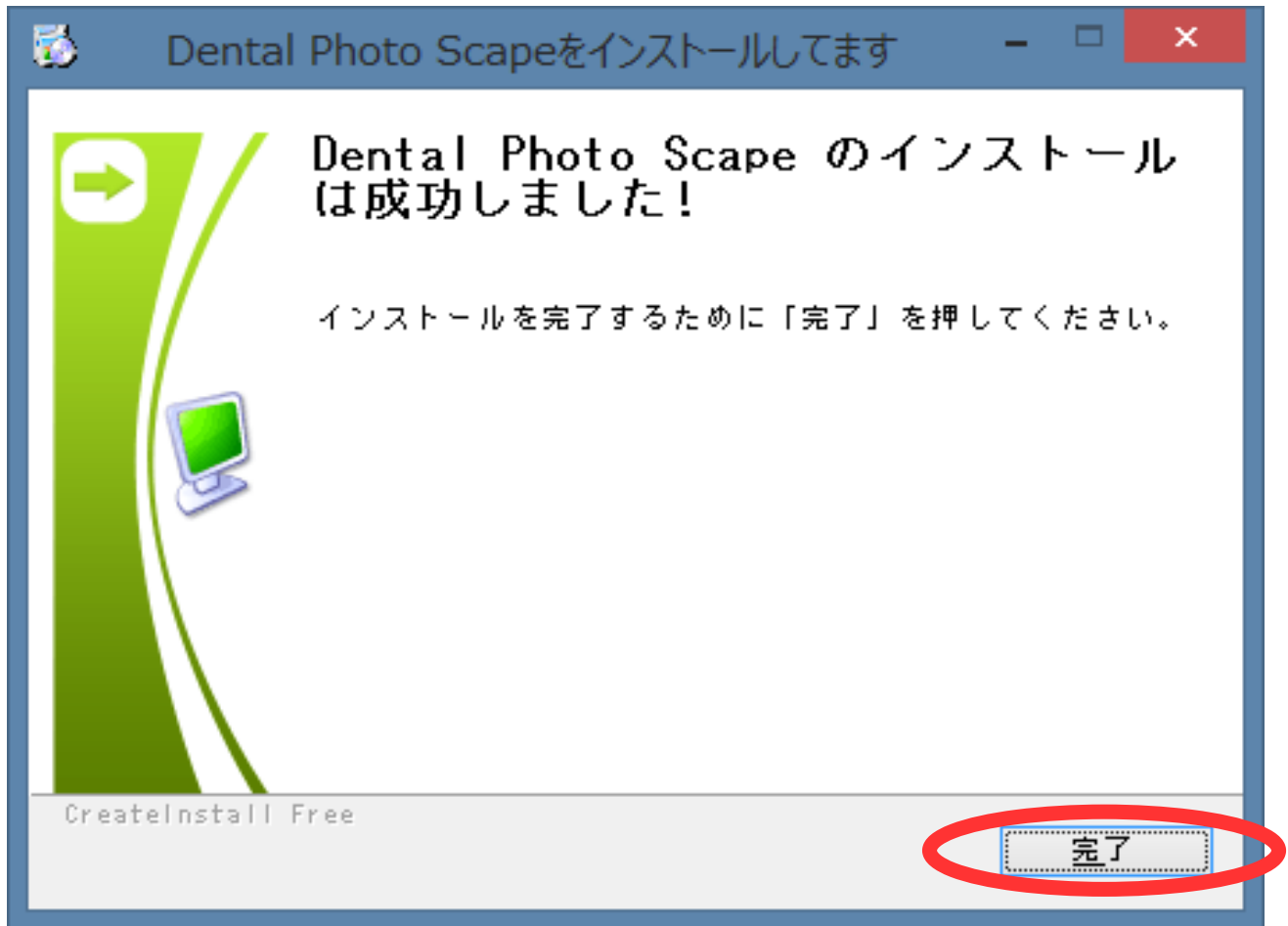


インストールが正常に終了したことを表しています。[完了]ボタンを押してインストーラを終了してください。インストールが正常に終了すると、デスクトップにDental Photo Scapeを起動するためのアイコンやマニュアルを参照するためのアイコンが作成されます。

## インストールの完了

インストールが完了しました。続いて、Dental Photo Scape の起動を行きましょう。

初めての起動では、情報の保存場所を選択することができます。ここでは、ネットワーク接続ハードディスク上に保存するよう設定を行います。

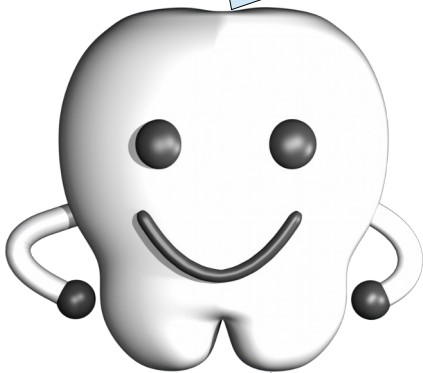


また、自動的にデータベースのセットアップ機能も動作します。データベースのセットアップにより、患者様情報のサンプルが作成されます。

自動的なデータベースのセットアップは、Dental Photo Scape の情報が存在しない場合のみ実施されます。

バージョンアップ後の起動時には実施されませんので、旧バージョンのデータを引き継いで利用することができます。


## Dental Photo Scape の起動

デスクトップに作成されたDental Photo Scapeアイコン（下図参照）をダブルクリックするか、スタートメニューからDental Photo Scapeを起動します。

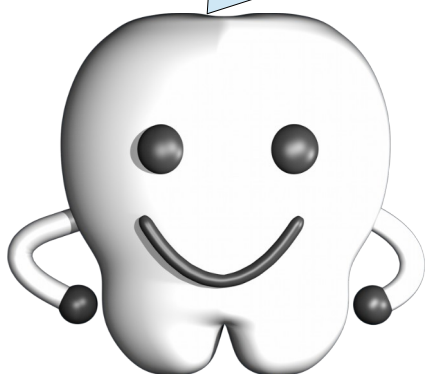


## 保存場所の選択

Dental Photo Scape の初めての起動では、下図のメッセージ (Dental Photo Scape は1台のパーソナルコンピュータのみで...<省略>... 複数台のパーソナルコンピュータで利用しますか?) が表示されます。

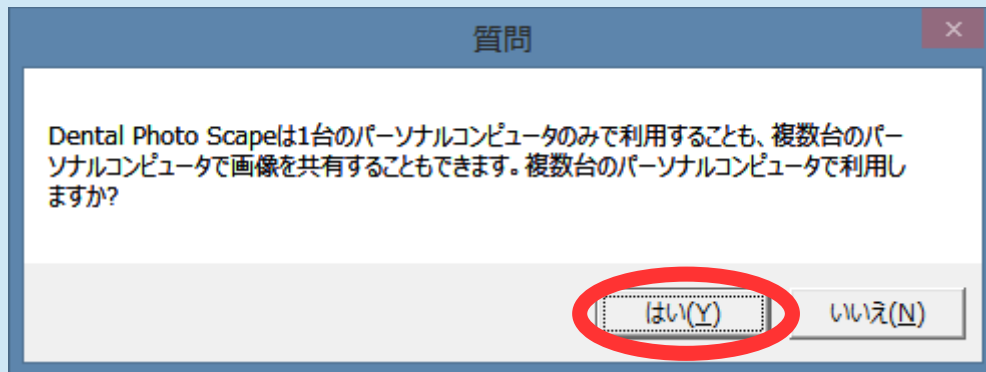

今回は [はい (Y)] ボタンを押します。

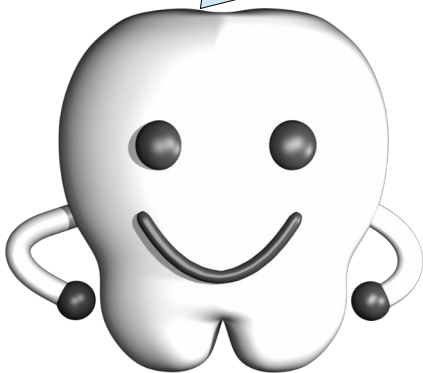



間違えて [いいえ (N)] ボタンを押した場合は、一度 Dental Photo Scape を終了します。その後、情報の保存場所のクリアを行ってから再度 Dental Photo Scape を起動してください。詳細は、

- ・ 『Dental Photo Scape 操作マニュアル - 応用編 - 』

を参照してください。

## 保存場所の決定


Windowsの『フォルダーの参照』画面が表示されますので、本書の『ネットワーク接続ハードディスクの準備』で割り当てたネットワークドライブを指定して [OK] ボタンを押します。

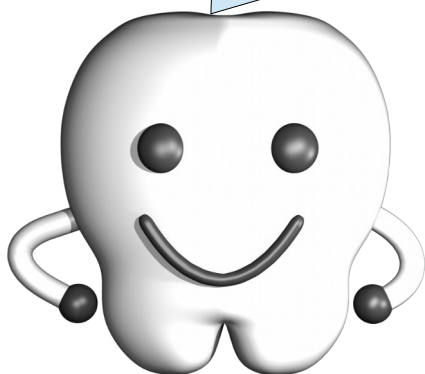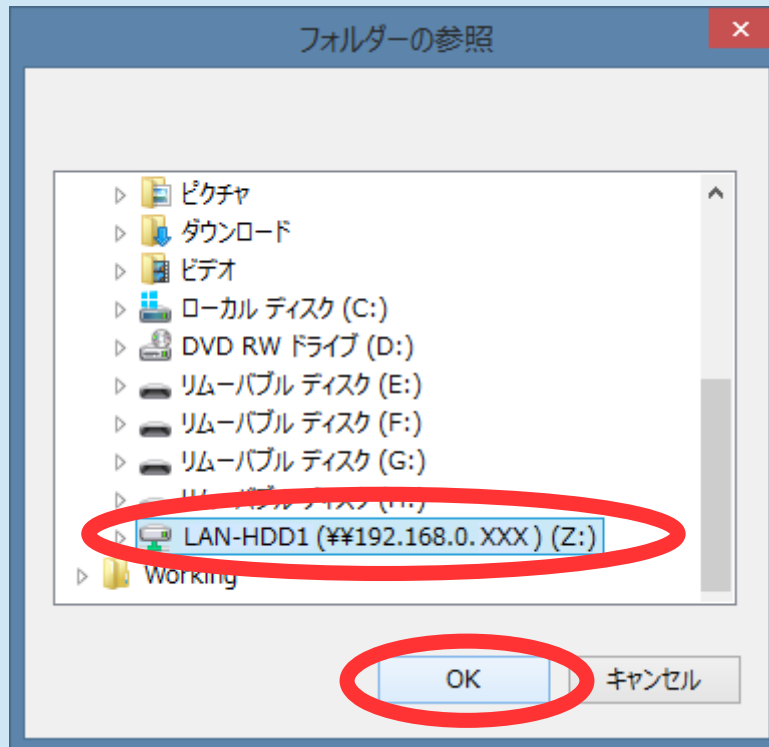

上の画面の例では、ネットワーク接続ハードディスクの共有フォルダをZ:に割り当てています。


## データベースのセットアップ

続いて、下図のメッセージ（データベースのセットアップを行います。...〈省略〉... 次回からは実施されません。）が表示されます。

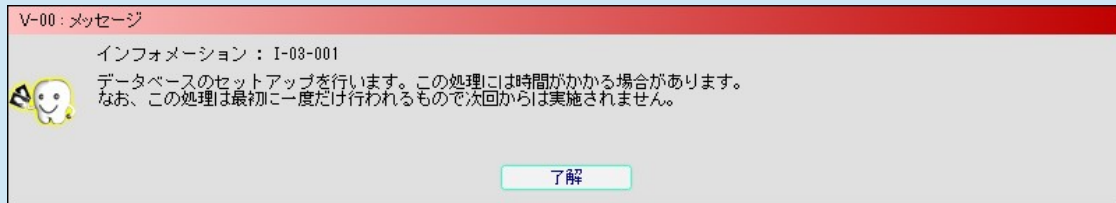

『データベースのセットアップ』により患者様情報のサンプルが作成されます。

[了解] ボタンを押し、データベースのセットアップを続行します。

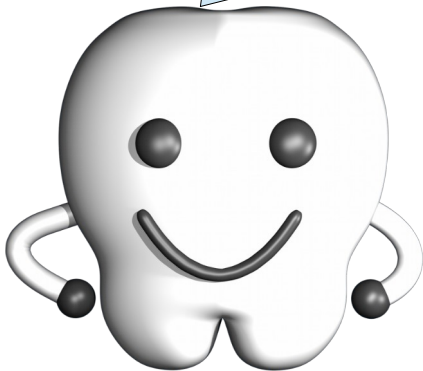


情報の保存先に指定したネットワーク接続ハードディスクの共有フォルダに、まだ、Dental Photo Scape の情報が存在しないためデータベースのセットアップが行われます。


データベースのセットアップの進行具合が表示されます。

#### V-01: セットアップ

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データベースのセットアップ中です。この処理には時間がかかる場合があります。処理が完了するまでこのままお待ちください。



自動的に次へ進みますのでそのままお待ちください。数十秒から数分の時間がかかります。

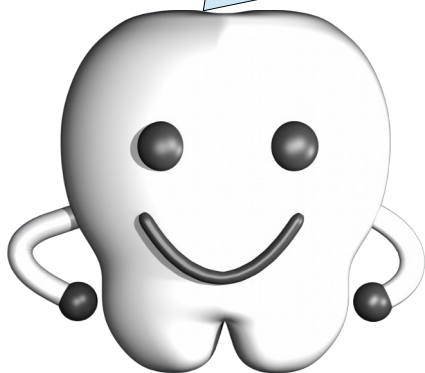

データベースのセットアップが完了すると、下図のメッセージ（データベースのセットアップが完了しました。）が表示されますので、[了解]ボタンを押してください。

#### V-00: メッセージ

インフォメーション: I-03-002  
データベースのセットアップが完了しました。



了解

## 試用確認

続けて、以下の画面が表示されます。この画面は、ライセンスを購入していない場合にのみ表示されるもので、ライセンスを購入し、正式版となった後は表示されません。

V-02: ライセンス認証


この製品はライセンス認証が行われていないため正式版とはなっておりません。試用する場合は[試用] ボタンを押してください。

ライセンスを購入済みである場合は[認証]を、ライセンスを購入する場合は[購入] ボタンを押してください。

なお、試用期間は導入から60日間となっております。

プロダクトキー 9276-8351-0102

購入  
認証  
試用

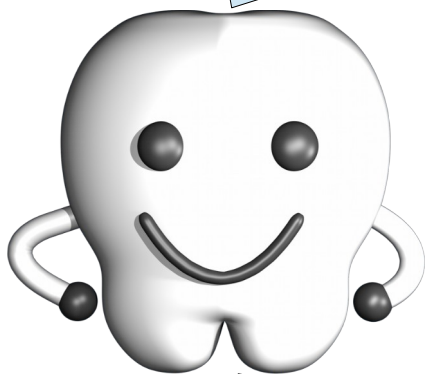


ここでは [試用] ボタンを押して下さい。

試用期間が満了するまでの残日数が表示されますので、[了解] ボタンを押してください。

V-00: メッセージ

インフォメーション: I-03-005


 この製品の試用期間は、残り 59 日です。

了解




## メイン画面

続いて、以下のようにメイン画面が表示されます。

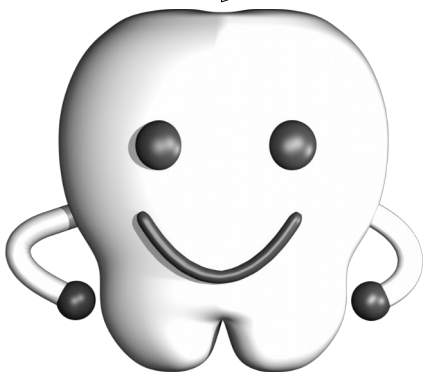

## Dental Photo Scape の終了

では、Dental Photo Scape を終了します。画面の右上にある [ 終了 ] ボタン（下図参照）を押してください。

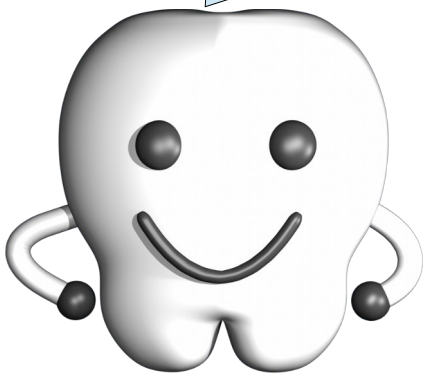


1 台のパーソナルコンピュータで運用を開始するなら  
59 ページ『次に行うべき作業』へ

引き続き 2 台目のパーソナルコンピュータの  
セットアップを行うなら  
次ページ『インストール手順 (NAS 上保存 2 台目以降の PC)』へ

## インストール手順 (NAS 上保存 2 台目以降の PC)

情報をネットワーク接続ハードディスク上に保存する場合の2台目以降のパーソナルコンピュータでのインストールの手順を説明します。

Dental Photo Scape のインストールと保存場所の選択を行います。

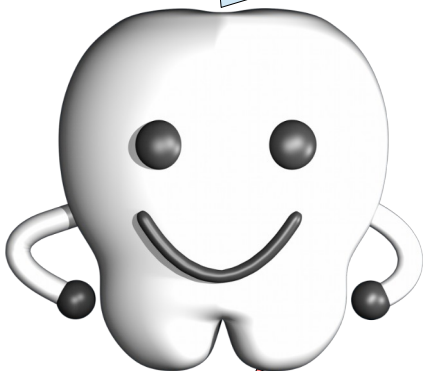

なお、Dental Photo Scape をバージョンアップする場合など、すでに Dental Photo Scape がインストールされている場合は、最初にインストール済みの Dental Photo Scape のアンインストールを実施してください。

アンインストールしてもデータは消去されずに新バージョンに引き継がれます。

アンインストールの手順については、別冊の、


- ・ 『Dental Photo Scape 操作マニュアル - 応用編 -』

を参照ください。

## ネットワーク接続ハードディスクの準備

1台目のパーソナルコンピュータと同じように、ネットワーク接続ハードディスク側で作成した共有フォルダを、パーソナルコンピュータ側でネットワークドライブを割り当てます。

既存のドライブ文字と重複しないZ:などを割り当ててください。

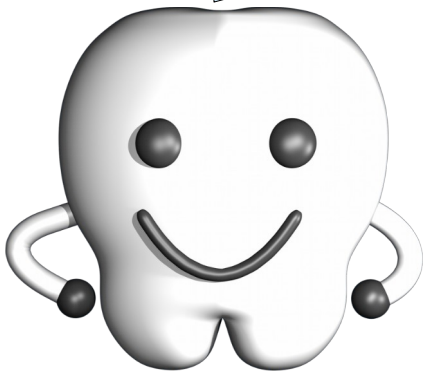



ドライブ文字が1台目と同じである必要はありません。1台目が、Z:で2台目がY:でも問題ありません。

## インストーラの実行

ダウンロードした、

SetupDentalPhotoScape-X.X.X.exe (下図参照)  
(X.X.Xの部分はバージョン番号に読み替えてください)



をダブルクリックし、インストーラを起動します。

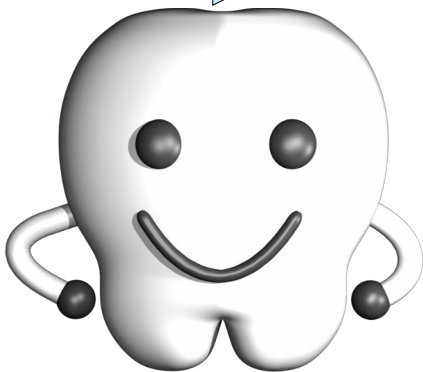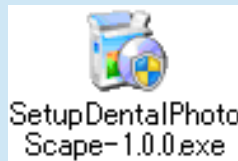

Windows XPの場合は、管理者権限が割り当てられたユーザでログインしてインストーラ (SetupDentalPhotoScape-X.X.X.exe) を起動してください。

よくわからなければ、初回起動時に作成したユーザでDental Photo Scapeのインストーラを実施してください。


インストール時に『ユーザー アカウント制御』という画面（下図参照）が表示されることがあります。

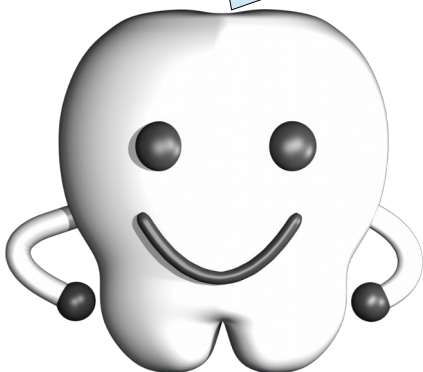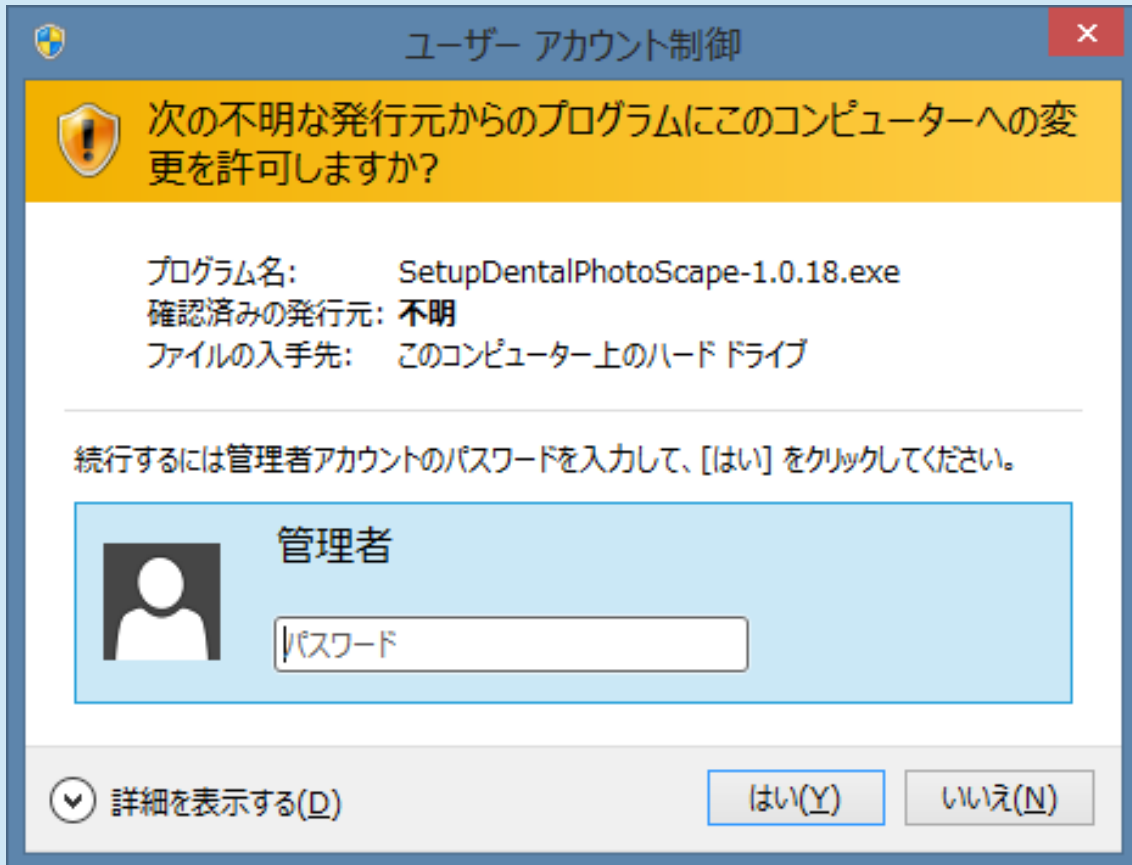

その場合には、**管理者のパスワードを入力してインストールを継続してください。**

## インストール

インストーラが起動しますので、下記の要領にて画面の操作を行って、インストールを行ってください。

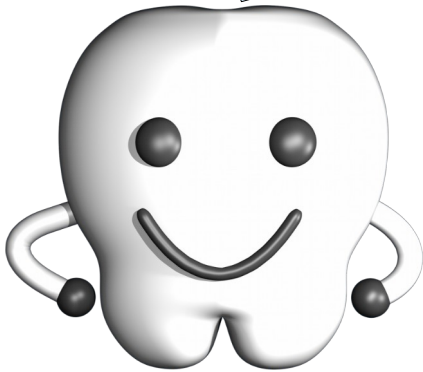


## 1. ようこそ画面



ようこそ画面です。インストールを中断する場合は[キャンセル]ボタンを、続行する場合は、[次へ >]ボタンを押して次へ進みます。


## 2. 使用許諾条件への同意

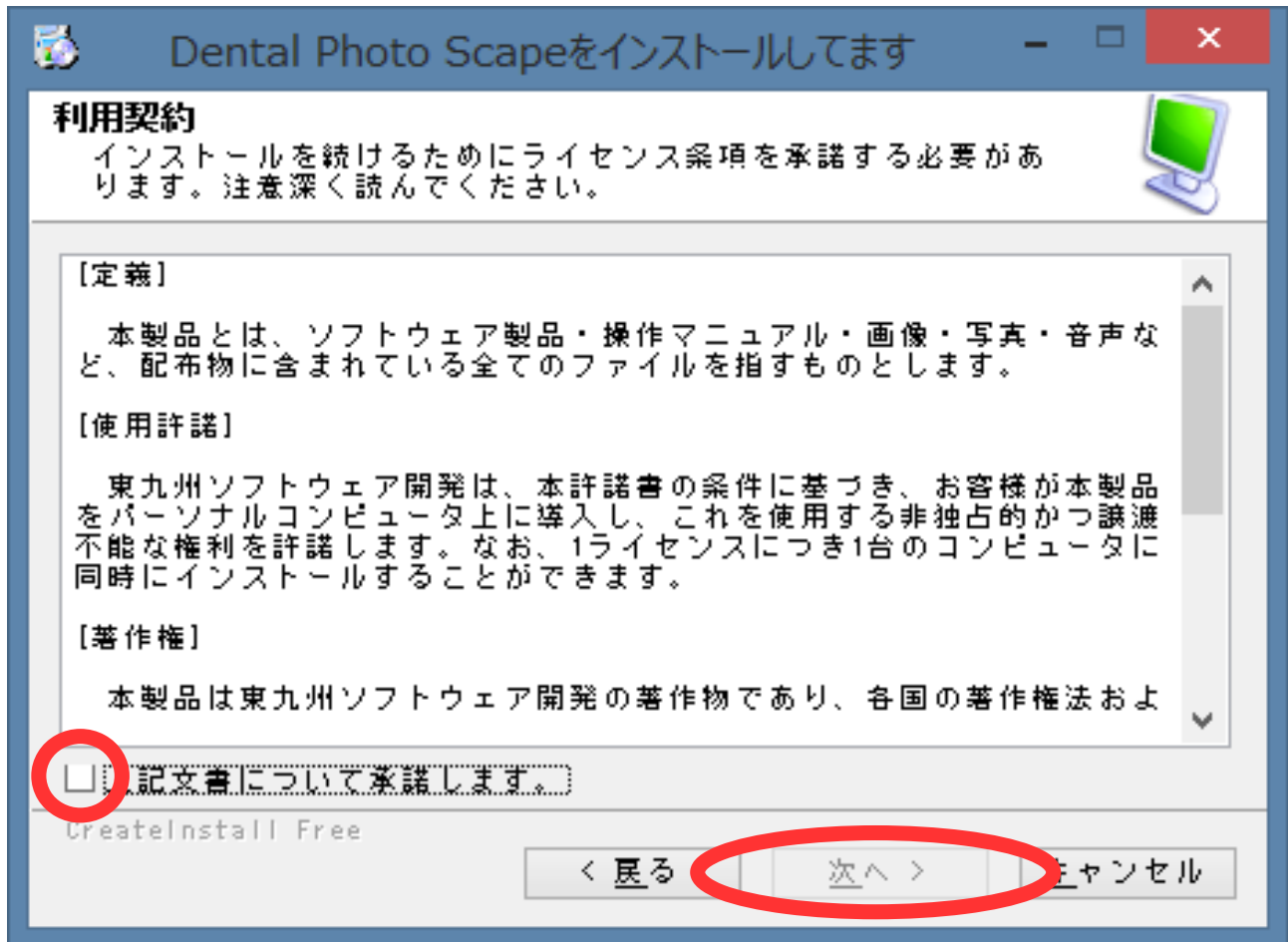

ライセンス条項(製品の使用許諾条件)が表示されます。内容を確認し、同意する場合は、[上記文書について承諾します。]チェックボックスをチェックし、[次へ >]ボタンを押して次へ進みます。承諾できない場合は、[キャンセル]ボタンを押してインストールを中断してください。




## 3. 製品の配置場所の設定

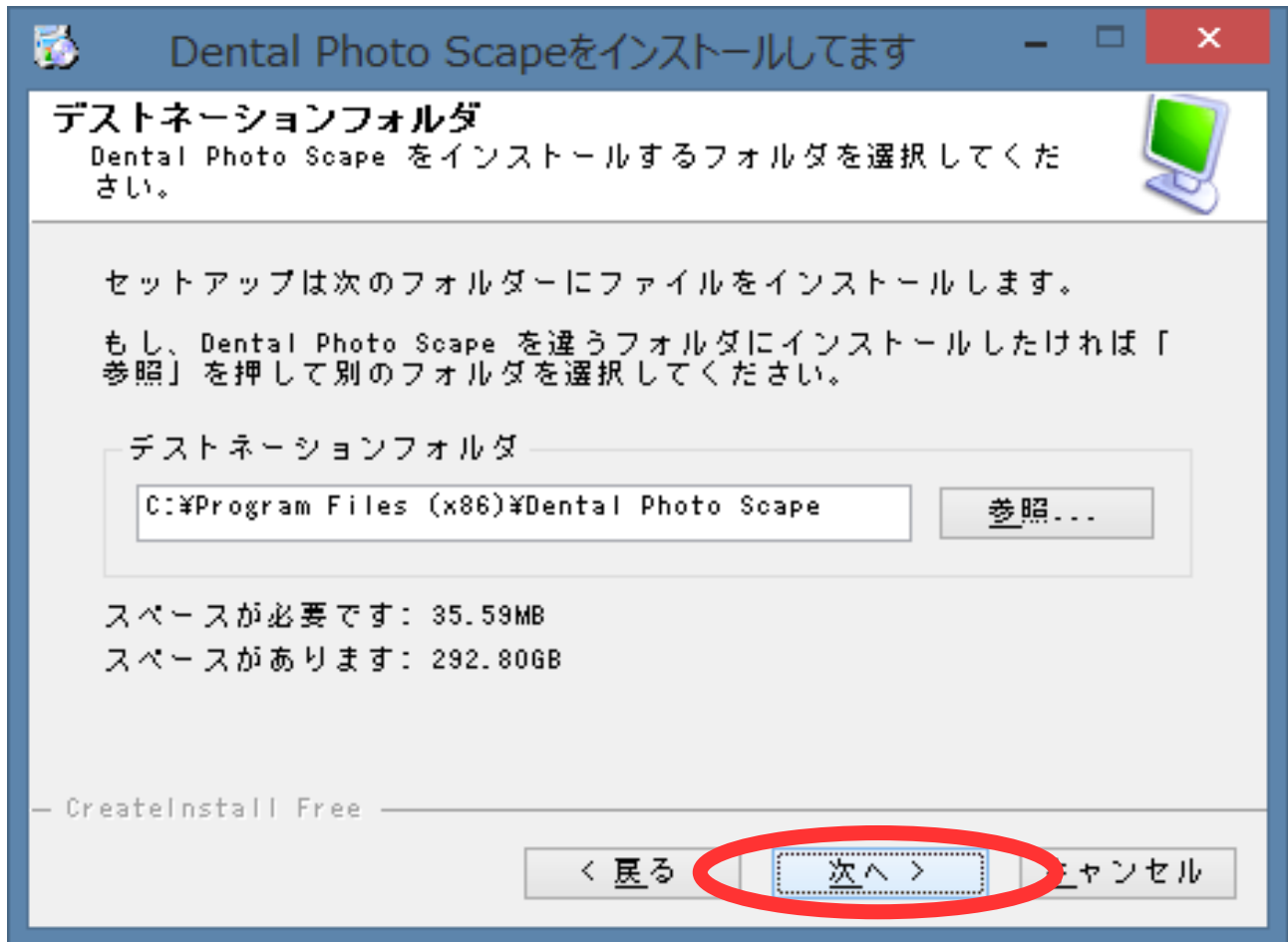


製品の配置場所を指定します。**初期値のまま問題ありません**。初期値のままインストールを行う場合は、[次へ >] ボタンを押して次へ進みます。別の場所にインストールを行う場合には、[参照] ボタンを押して場所を変更し、[次へ >] ボタンを押して次へ進みます。

## 4. 進行中画面

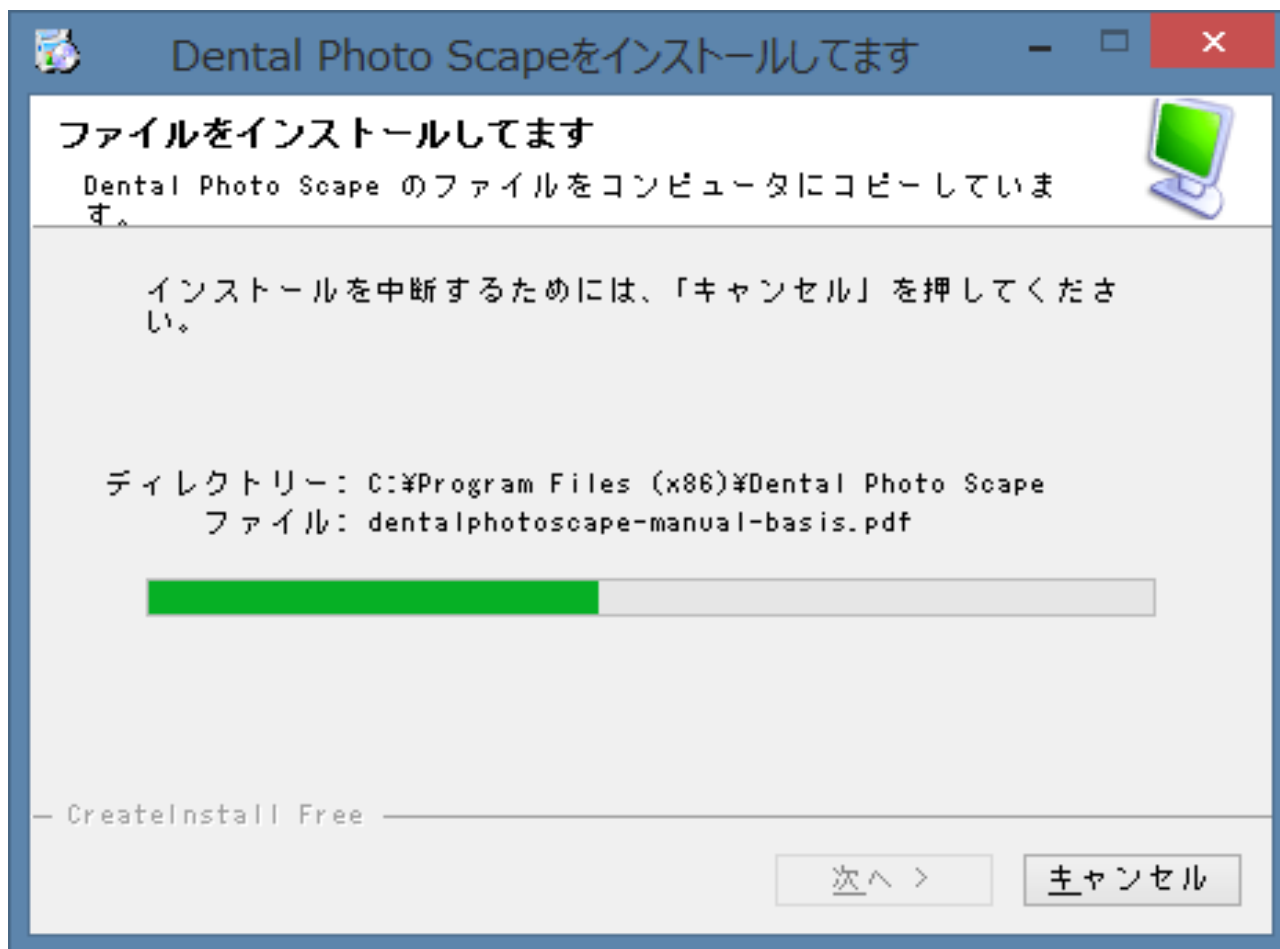

インストールの進行具合が表示されます。自動的に次へ進みますのでそのままお待ちください。

## 5. 完了画面

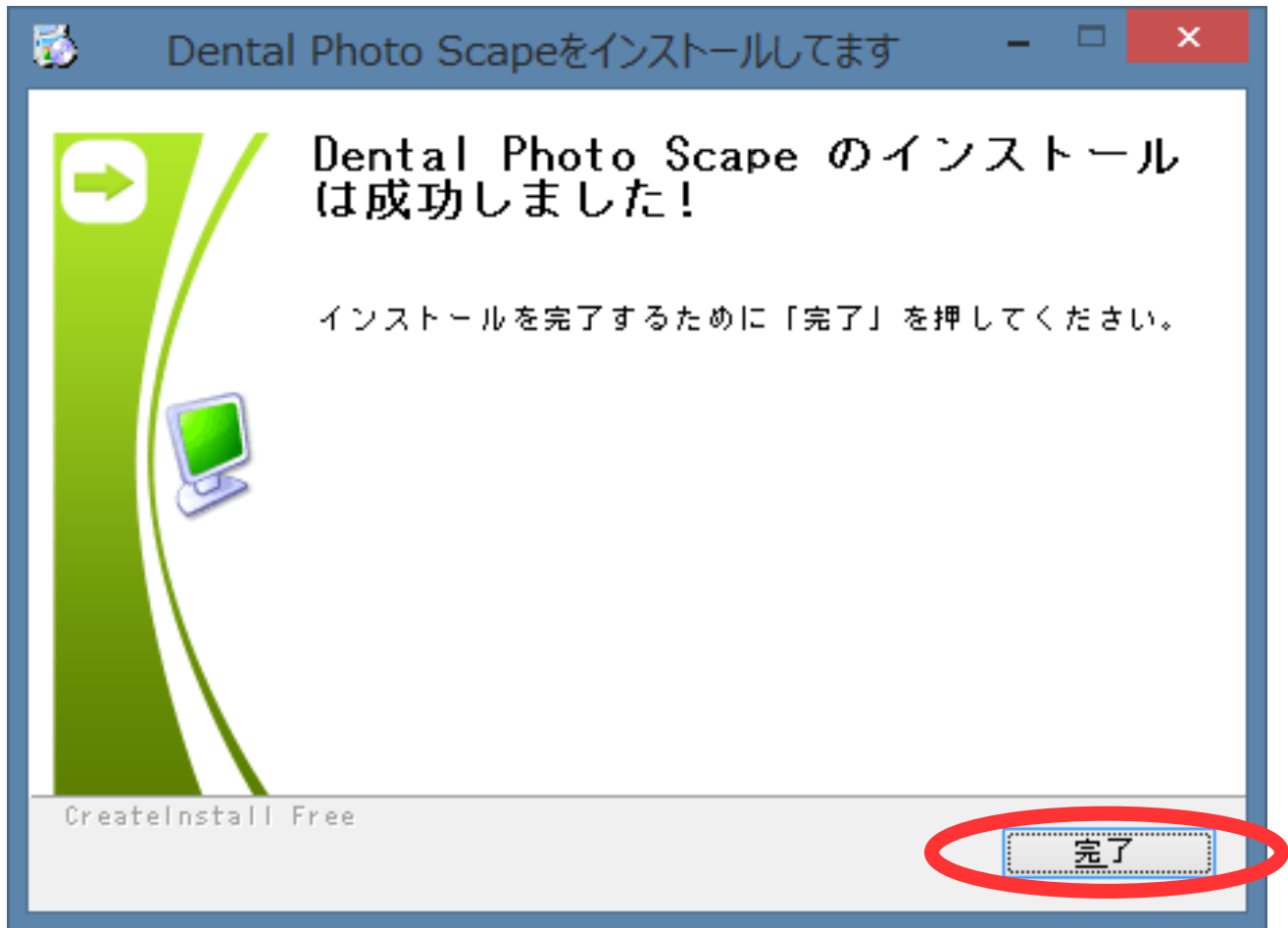


インストールが正常に終了したことを表しています。[完了]ボタンを押してインストーラを終了してください。インストールが正常に終了すると、デスクトップにDental Photo Scapeを起動するためのアイコンやマニュアルを参照するためのアイコンが作成されます。

## インストールの完了


インストールが完了しました。続いて、Dental Photo Scape の起動を行きましょう。

初めての起動では、情報の保存場所を選択することができます。ここでは、ネットワーク接続ハードディスク上に保存するよう設定を行います。

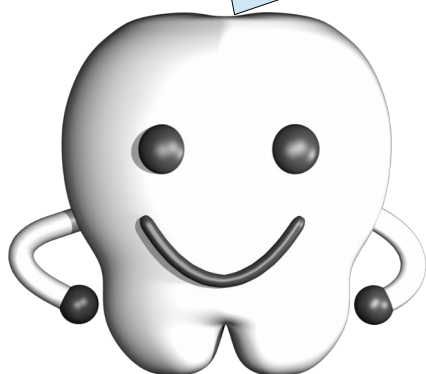


## Dental Photo Scape の起動

デスクトップに作成されたDental Photo Scapeアイコン（下図参照）をダブルクリックするか、スタートメニューからDental Photo Scapeを起動します。

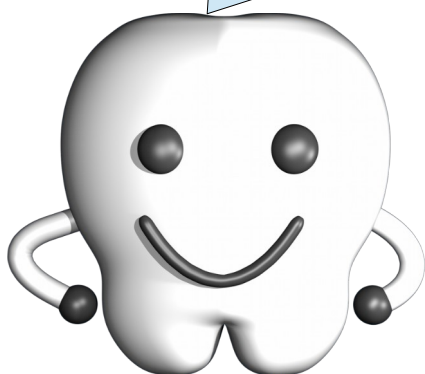


## 保存場所の選択

Dental Photo Scape の初めての起動では、下図のメッセージ (Dental Photo Scape は1台のパーソナルコンピュータのみで... <省略>... 複数台のパーソナルコンピュータで利用しますか?) が表示されます。

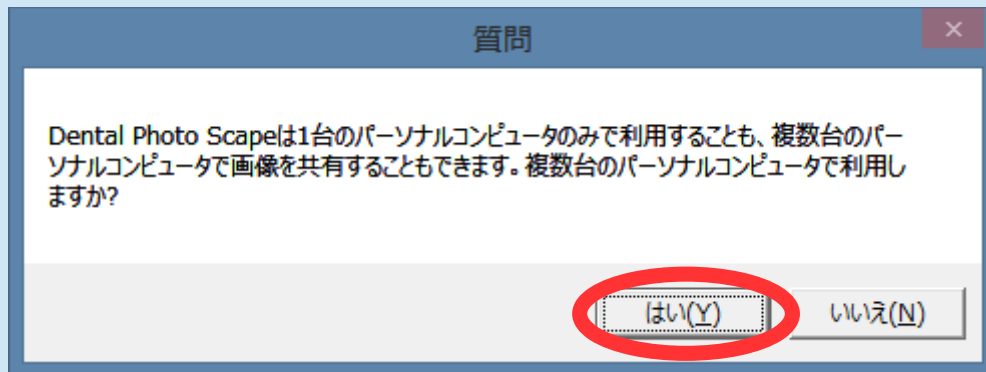

今回は [はい (Y)] ボタンを押します。

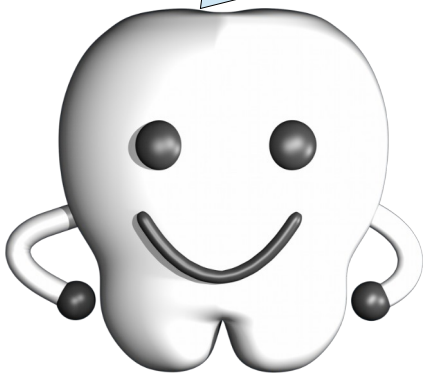



間違えて [いいえ (N)] ボタンを押した場合は、一度 Dental Photo Scape を終了します。その後、情報の保存場所のクリアを行ってから再度 Dental Photo Scape を起動してください。詳細は、

- ・ 『Dental Photo Scape 操作マニュアル - 応用編 - 』

を参照してください。

## 保存場所の決定

Windowsの『フォルダーの参照』画面が表示されますので、本書の『ネットワーク接続ハードディスクの準備』で割り当てたネットワークドライブを指定して [OK] ボタンを押します。

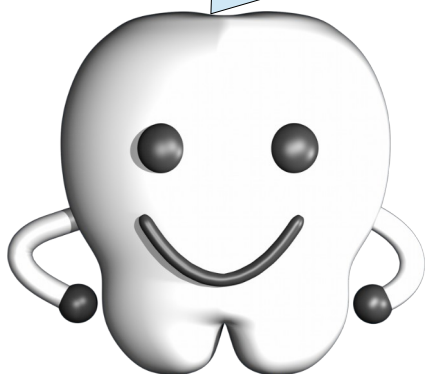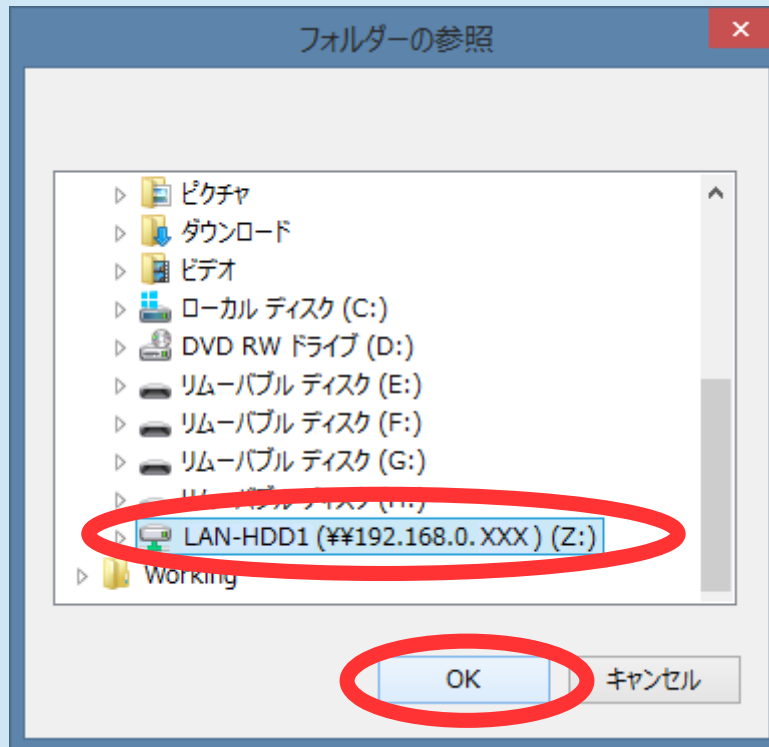

上の画面の例では、ネットワーク接続ハードディスクの共有フォルダをZ:に割り当てています。

## 試用確認

続けて、以下の画面が表示されます。この画面は、ライセンスを購入していない場合にのみ表示されるもので、ライセンスを購入し、正式版となった後は表示されません。

V-02: ライセンス認証


この製品はライセンス認証が行われていないため正式版とはなっておりません。試用する場合は[試用] ボタンを押してください。

ライセンスを購入済みである場合は[認証]を、ライセンスを購入する場合は[購入] ボタンを押してください。

なお、試用期間は導入から60日間となっております。

プロダクトキー 9276-8351-0102

購入  
認証  
試用

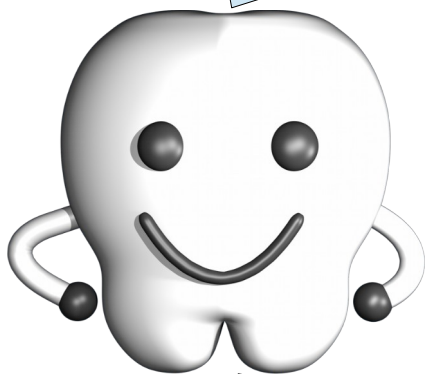


ここでは [試用] ボタンを押して下さい。

試用期間が満了するまでの残日数が表示されますので、[了解] ボタンを押してください。

V-00: メッセージ

インフォメーション: I-03-005


 この製品の試用期間は、残り 59 日です。

了解




## メイン画面

続いて、以下のようにメイン画面が表示されます。

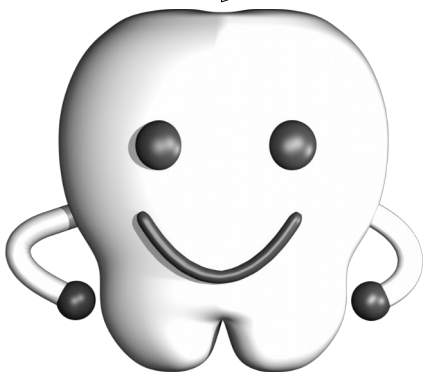

## Dental Photo Scape の終了

では、Dental Photo Scape を終了します。画面の右上にある [ 終了 ] ボタン（下図参照）を押してください。

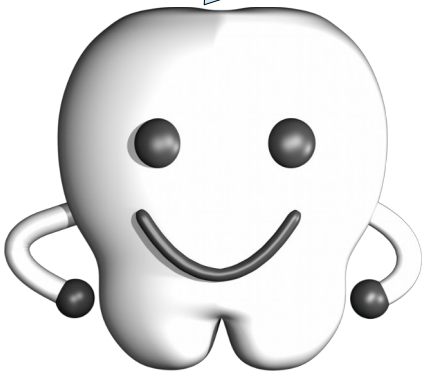

次ページ『次に行うべき作業』へ

## 次に行うべき作業


Dental Photo Scape のインストール作業およびデータベースのセットアップが完了しました。

後は、Dental Photo Scape を使って画像の登録と照会を快適に行っていただくことを祈るばかりです。

今後のDental Photo Scape での作業については、

- ・ 『Dental Photo Scape 操作マニュアル - 基本編 - 』
- ・ 『Dental Photo Scape 操作マニュアル - 応用編 - 』

を参照してください。

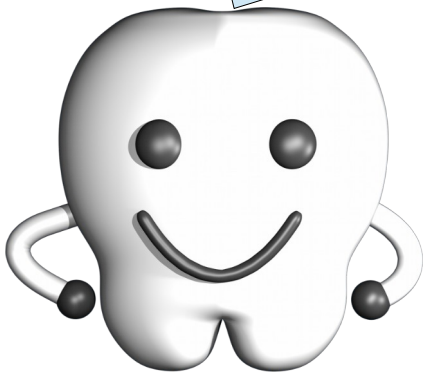

『Dental Photo Scape 操作マニュアル - 基本編 - 』  
へ読み進んでください